

LoFric
origo™

LoFric® Origo™




– Sikker kateterisering
og en unik indpakning


Kan foldes til en smart diskret lommestørrelse



Øjeblikkelig aktivering

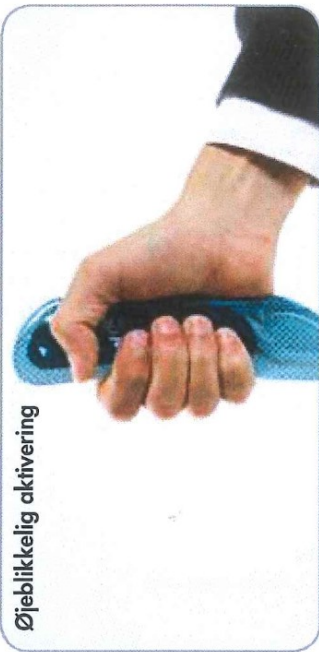


Selvlæbende tape til ophæng af pakken

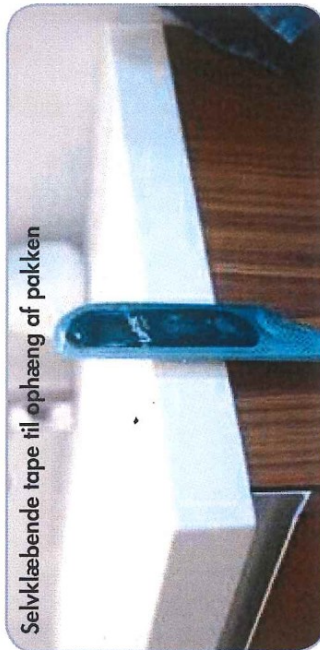

Peel-open



Justerbart integreret håndtag

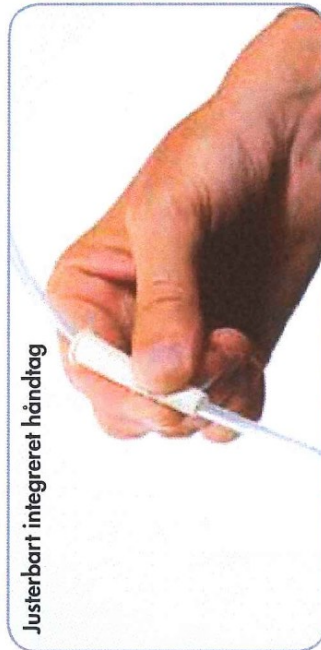

Diskret affald



Få mere information på LoFric.dk


Brugsanvisning

Hydrofilt engangskateter med saltvandsopløsning

Vask først dine hænder med vand og sæbe.




1. Tryk på posen med saltvandsopløsningen og kateteret er klart til brug.

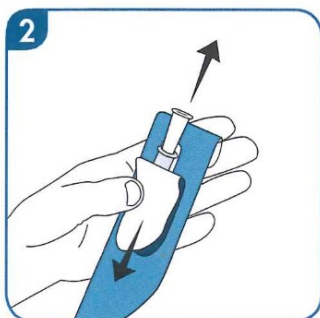

2. Træk fligen ned for at åbne.




3. Hvis nødvendigt brug den selvklæbende tape på bagsiden til at hænge kateteret op.

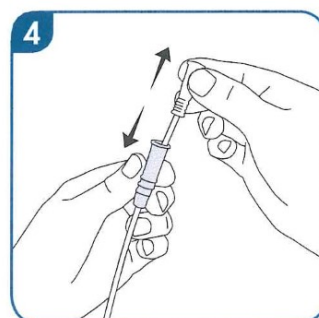

4. Træk og juster det integrerede håndtag under konnektoren for bedre kontrol af kateteret under kateterisering samt optimal hygiejne.

Tip

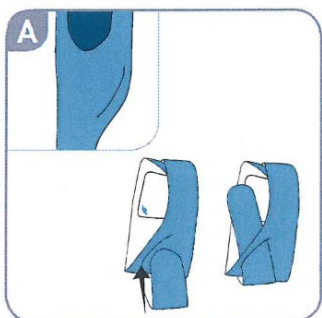

A. Fold pakningen og brug den lille slids til at holde det sammenfoldet.

VIGTIG INFORMATION

Dette er et sterilt engangsprodukt. Når kateteret er anvendt vil belægningen nedbrydes, og det er ikke længere sterilt. Anvend kun saltvandsopløsningen til klargøring af kateteret.