

## Mepore®

Kirurgisk forbindelse med klæb

### Produktbeskrivelse

Mepore er en steril, selvklæbende og absorberende bandage.

Mepore består af:

- en absorberende sårpude med et integreret, ikke-klæbende sårkontaktlag
- en klæbende kant med vandbaseret akrylatklæb. Klæbemidlet er hudvenligt og uden organiske opløsningsmidler. Klæbeområdet er dækket med to stykker overlappende beskyttelsesfilm, der muliggør aseptisk applicering.
- et åndbart nonwoven ydermateriale, der yder en fysisk beskyttelse af såret.

Bandagens materialeindhold:

Akrylatklæb, polyestert nonwoven, viskose og polyolefin nonwoven

### Anvendelsesområde

Mepore er beregnet til brug på let til moderat væskende sår som f.eks. kirurgiske sår, snitsår og hudalskrabninger.

### Forholdsregler

- Anvend ikke Mepore på patienter med kendt overfølsomhed over for akrylatklæb eller over for andre materialer/bestanddele, der indgår i produktet.
- Må ikke anvendes på skrøbelig hud. Anvendelse på skrøbelig hud kan forårsage hudirritation.
- Stræk ikke bandagen ved applicering.
- Hvis der agttages tegn på infektion, f.eks. feber eller hvis såret eller det omkringliggende hudområde bliver rødt, varmt eller hævet, skal du kontakte sundhedsfagligt personale vedrørende passende behandling.
- Må ikke genanvendes. Hvis produktet genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminering.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage (sterile barriere) er beskadiget eller har været åbnet for brug. Må ikke resteriliseres.

### Brugsanvisning

Mepore kan bruges af ikke-fagpersoner under tilsyn af sundhedspersonale.

1. Rens såret i henhold til de kliniske retningslinjer. Tør den omkringliggende hud grundigt. Undgå at anvende cremer, geler eller salver på huden omkring såret, da det kan påvirke klæbeevnen.
2. Fjern beskyttelsesfilmen, og applicer bandagen med den klæbende side mod huden uden at strække bandagen. Sørg for, at den absorberende pude dækker såret.
3. Tryk let på klæbekanten for at sikre en tilstrækkelig hæftning på huden.
4. Ved fjernelse skal du holde i kanten og langsomt trække bandagen af huden i samme retning som hårene.

For at forhindre friktion, der kan forvolde skader på huden, skal det omhyggeligt sikres, at Mepore ikke strækkes under applicering. Når den lægges på over led, skal den omhyggeligt lægges på således, at den ikke hæmmer leddets bøjelighed. Efter nogle kirurgiske indgreb kan der opstå kraftig hævelse. I disse tilfælde vil det være bedre at bruge en mere fleksibel bandage for at minimere spændingen i huden.

Mepore bør skiftes, før den er helt mættet, ved tegn på tækage eller efter anvisninger fra sundhedsfagligt personale.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

### Andre oplysninger

Enhver alvorlig ulykke relateret til brugen af Mepore skal rapporteres til Mölnlycke Health Care.

*Mepore® er et registreret varemærke tilhørende Mölnlycke Health Care AB*