

Mepore® IV

Transparent IV film bandage



Sterilt. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres.

Produktbeskrivelse

Mepore IV er en transparent, åndbar bandage bestående af polyurethan film med polyacrylat klæb, en del af bandagen er forstærket med non-woven.

Sådan virker Mepore IV

Mepore IV beskytter kateter området og giver en sikker fiksering. Mepore IV produktet er velegnet til at bandagere perifer og central katetre. Mepore IV er åndbar og vandtæt.

Anvendelsesområde

Mepore IV er beregnet til fiksering af intravaskulær udstyr så som IV katetre eller andre intravaskulære katetre.

Forholdsregler

Må ikke strækkes under påsætning.

Huden skal være tør før påsætning.

Livsvigtigt udstyr bør ikke fikseres med Mepore IV.

Mepore IV bør ikke erstatte sutur eller andre metoder til primær lukning af sår.

Hvis produktet genanvendes, kan dets ydeevne blive forringet, og der kan ske krydskontamination.

Brugsanvisning

1. Rens området
2. Fjern beskyttelsespapiret
3. Beskyt og fikser udstyret.
4. Fjern papirrammen

Aftagning

For at undgå at kateteret løsner sig og for at modvirke traume mod huden, bør huden og kateteret støttes mens bandagen fjernes.