



 **smith&nephew**
BACTIGRAS[®]
Chlohexidine Acetate Tulle
Gras Dressing

Økonomisk - effektiv mod
MRSA in-vitro



BACTIGRAS[®] Økonomisk - effektiv mod MRSA *in-vitro*

BACTIGRAS fremstilles af specialvævet, dobbeltrådet, åben Leno-Gaze imprægneret med ren, blød paraffin tilsat 0.5% klorhexidin-acetat BP. BACTIGRAS leveres steril og med beskyttelsespapir, der gør aseptisk applikation lettere. Klorhexidin er et gennemprøvet antiseptikum, der er aktivt over for de fleste Gram-positive samt nogle Gram-negative organismer, inklusiv MRSA. Der er ikke observeret krydsresistens med forbindingen og overfølsomhed forekommer sjældent.

BACTIGRAS anbefales som ikke-klæbende kontaktag på inficerede eller infektionstruede sår, og kan bruges i forbindelse med systemisk infektionsbehandling.

BACTIGRAS findes i flere forskellige størrelser og kan let klippes til i størrelsen med beskyttelsespapiret på.

BACTIGRAS er ikke-klæbende og giver let drænage fra såret.

Indikationer

BACTIGRAS kan anvendes på følgende sårtyper:

- Mindre brandsår og skoldninger
- Lacerationer, abrationer og andre sår med hudtab
- Donor- og recipientsteder ved hudtransplantation
- Bensår

Kontraindikationer

BACTIGRAS forbindinger bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed eller allergi overfor klorhexidin.

Præsentation

Hver enkelt BACTIGRAS forbinding (også rullen) er individuelt emballeret i peel packs og er gamma steriliseret.


Forholdsregler

BACTIGRAS bør ikke anvendes på mere end 10% af kroppens overflade.

Dermatit og sensitivitet forekommer sjældent. Anafylaktisk reaktion overfor klorhexidin er rapporteret, men er sjældent forekommende.

Undgå kontakt med øjne, mellemøret, meninges og hjernen.

BACTIGRAS er ikke kompatibel med sæber eller andre anioniske materialer samt kaliumjodid. Undgå brug sammen med oxiderende sårrensere som f.eks brintoverilte.

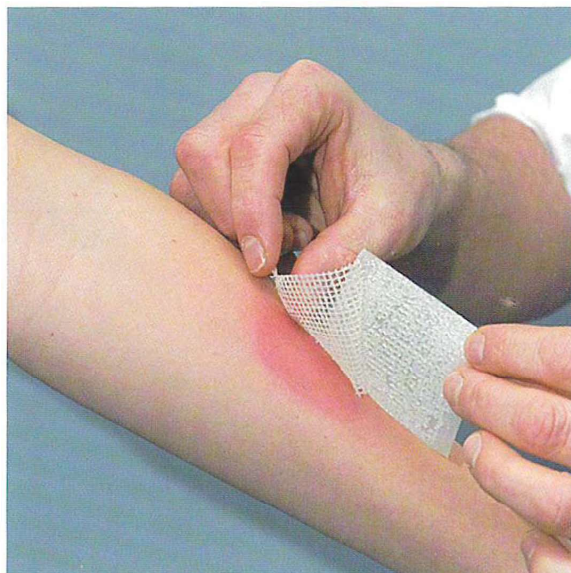

Produktsortiment

Varenr.	Størrelse	Pakning
7456	5cm x 5cm	50 forbindinger
7457	10cm x 10cm	10 forbindinger
7461	15cm x 20cm	10 forbindinger
66007505	15cm x 1m rulle	1 rulle
66003661	10cm x 40cm	10 forbindinger

Wound Management www.smith-nephew.com
Smith & Nephew
Nærum Hovedgade 2
Postboks 30
2850 Nærum

T 45 80 61 00
F 44 80 61 51