

 **smith&nephew**  
**OPSITE<sup>◇</sup>**  
**FLEXIGRID<sup>◇</sup>**  
Transparent Film Dressing

Transparent filmforbinding.  
Vandtæt, bakterietæt og steril

# OPSITE<sup>®</sup> FLEXIGRID<sup>®</sup> er en transparent klæbende film forbindelse med et unikt sårmaalingsnet. Filmen er vandtæt, bakterietæt, smidig og elastisk.

OPSITE FLEXIGRID giver klinisk dokumenteret fugtig sårheling til overfladiske sår. Den er også ideel til brug som sekundær forbindelse og hjælper til at forebygge tryksår.

## Fordele

### Hurtig og mindre smertefuld sårheling

OPSITE FLEXIGRID sørger for et fugtigt miljø til hurtigere og mindre smertefuld sårheling. Den høje permeabilitet betyder minimal hudmaceration.

### Enestående film med akryl klæbemasse

OPSITE FLEXIGRID filmen er meget fleksibel og har en hudvenlig akryl klæbemasse. Dette gør, sammen med den høje permeabilitet at forbindingen kan blive siddende i op til 14 dage.

### Vandtæt og bakterietæt

OPSITE FLEXIGRID er uigennemtrængelig for vand og ekssudat, hvilket tillader patienten at bade uden at skifte forbindingen. Filmen giver en bakteriel barriere og reducerer risikoen for sekundær infektion.

### Simpel og effektiv applikationsteknik

OPSITE FLEXIGRID's fleksible bærefilm gør det let at applikere forbindingen, da den er transparent og kan placeres nøjagtigt over såret.

### Kan applikeres selv på vanskelige steder

OPSITE FLEXIGRID er fremstillet til at kunne applikeres overalt på kroppen. Den kan let klippes i passende stykker eller strips til applikation på vanskelige steder, såsom hæle, albuer og knæ.

### Unik sår-afmærkning

OPSITE FLEXIGRID Den ternede bærefilm muliggør enkel og nøjagtig registrering af helingsprocessen. Efter afmærkning af sårarealet fjernes FLEXIGRID bærefilmen og opbevares i patientens journal.

## Indikationer

Overfladiske sår, såsom overfladiske tryksår, mindre brandsår og skoldninger, hudafskrabninger og rifter.

Forebyggelse af tryksår og hudbeskyttelse af huden omkring stomier og under urinposer.

Bensår i sidste stadie af sårhelingen (epiteldannelse).

Fiksering af primær forbindinger f.eks. INTRASITE<sup>®</sup> Gel eller ALLEVYN<sup>®</sup> CAVITY.

Til post-operative sår, hudtransplantater og donor steder.

Smerter i forbindelse med diabetisk neuropati.

## Bemærk ved applikation og fjernelse

Før applikation af OPSITE FLEXIGRID bør huden renses og tørres.

Ved fjernelse af filmen, løft i et hjørne og træk forsigtigt filmen væk fra såret parallelt med huden.

## Forholdsregler




OPSITE FLEXIGRID kan bruges på klinisk inficerede sår hvis de følgende forholdsregler overholdes:

Patienten bør være under medicinsk/klinisk supervision.

Forbindingen bør skiftes dagligt.

Infektionen bør i øvrigt behandles efter lokal protokol.

Gentagne applikationer på skrøbelig hud, kan i enkelte tilfælde give hudirritation eller skade huden. Dette er fælde for alle klæbende produkter.

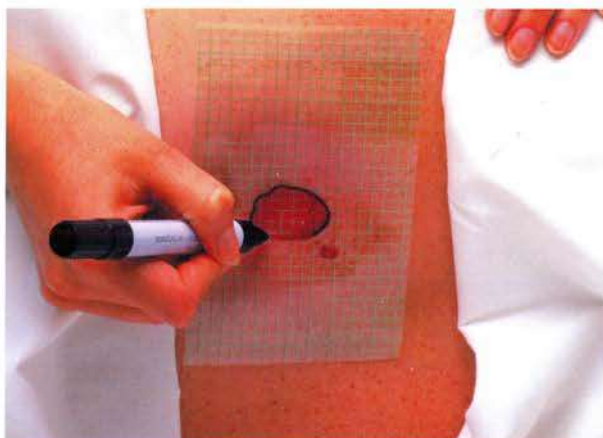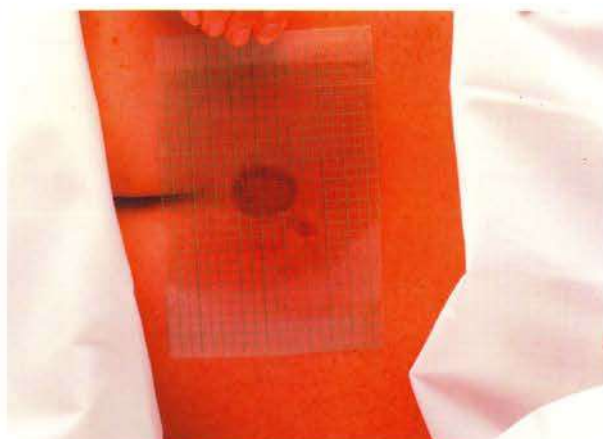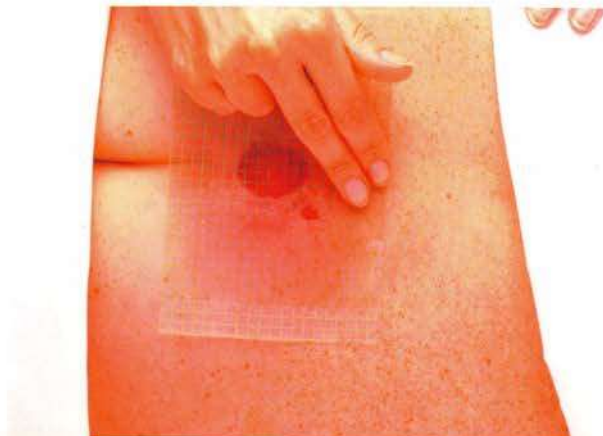

### Produktsortiment

Varenummer	Størrelse	Pakning
4628	6cm x 7cm	100
4629	10cm x 12cm	10
4630	10cm x 12cm	50
4631	15cm x 20cm	10
4632	12cm x 25cm	20
66004633	10cm x 8cm	100

Wound Management [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)  
Smith & Nephew  
Nærum Hovedgade 2  
Postboks 30  
2850 Nærum

T 45 80 61 00  
F 45 80 61 51

\*Trademarks of Smith & Nephew  
6867/FLEXIGRID/SS/GLOBAL/0404/V5