



## Datablad

# 3M™ Tegaderm™ Hydrogel

### Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ Hydrogel er en steril flydende gel, velegnet til at opretholde eller genskabe et fugtigt sårmiljø.

### Egenskaber:

- nem at applicere
- ikke cytotoxic
- leveres steril i 15 grams tuber
- latexfri

### Indikationer:

- tørre til minimalt væskende sår:
- tryksår
- arterielle sår
- venøse sår
- diabetiske sår
- hudrifter
- hudafskrabninger
- stråleskader
- cancersår
- autolytisk revision
- rehydrering af sår




## Brugsvejledning:

**Bemærk:** Følg gældende procedurer for kontrol af infektion.



1. Rengør såret og den omkringliggende hud.

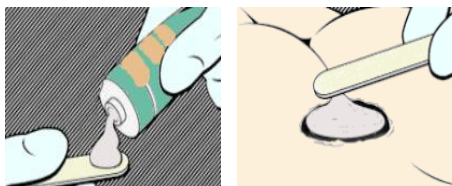

2. Påfør nok Tegaderm Hydrogel til at dække såret/nekrosen .



3. Applicer en sekundær forbinding ex. Tegaderm – Tegaderm +Pad .

Forventes større mængder af sårsekret, eller er huden beskadiget, kan en hudbeskyttelsesfilm, såsom 3M Cavilon™ No Sting barrierefilm, med fordel anvendes.

Lad barrierefilmene tørre inden en sekundær forbinding appliceres.

## Deklaration:

Vand, propylenglykol, guar gummi og natriumtetraborat.

## Holdbarhed og opbevaring:

Opbevares tørt ved stuetemperatur. Skruelåget skal være lukket.

Holdbarhed: 2 år efter produktionsdato.

## Bestillingsinformation

# 3M™ Tegaderm™ Hydrogel

Varenr.:	Størrelse	Antal/æske	æske/karton
91110	15 gr.	10	10