

# Biatain® Super

Adhesive



# Biatain® Super

Non-Adhesive

Klæbende hydrokapillær bandage  
Ikke-klæbende hydrokapillær bandage



## Brugervejledning

23315925 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. ©  
(2014-07-22)

## Indikationer

Produktet er en steril, hydrokapillær engangsbandage, der understøtter fugtig sårheling og ekssudathåndtering.

Biatain Super, Klæbende, er primært indiceret til behandling af stærkt, moderat og lavt væskende tryksår og bensår med sunde hudomgivelser.

Biatain Super, Ikke-klæbende er primært indiceret til behandling af stærkt, medium og lavt ekssuderende bensår med sarte hudomgivelser.

## Biatain Super

- kan anvendes til 2. grads forbrændinger, diabetiske sår (primært underben og fod), postoperative sår og hudafskrabninger.
- kan anvendes på patienter, som er i behandling for lokal eller systemisk infektion efter lægens vurdering.
- er egnet til brug i kombination med kompressionsbehandling.
- kan sidde i op til 7 dage afhængigt af mængden af sårvæske, placering af bandagen og sårtype.
- kan anvendes under hele helingsprocessen for at yde beskyttelse i forbindelse med de angivne sårtyper.

## Information

Produktet er en hydrokapillær bandage, der fås i en klæbende og en ikke-klæbende udgave.

Biatain Super, Klæbende, består af:

- en hydrokolloidklæbekant.
- et sårkontaktlag.
- en absorberende pude (hydrokapillær lag).
- en topfilm, som er semipermeabel, men bakterie- og vandtæt.

Biatain Super, ikke-Klæbende, består af:

- et mikroporøst hudbeskyttelseslag.
- en hydrokolloid membran.
- et sårkontaktlag.
- en absorberende pude (hydrokapillær lag).
- en topfilm, som er semipermeabel, men bakterie- og vandtæt.

Hvis der opstår en allergisk reaktion, bedes du kontakte din læge.

Steriliseret med bestråling

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplast aktuelle anbefalinger.

## Forbehold

En læge bør hyppigt tilse og behandle diabetiske sår og sår, som helt eller delvist skyldes arteriel insufficiens, i henhold til lokale retningslinjer.

Produktet må ikke anvendes sammen med en hydrogel på tør nekrose pga. potentiel risiko for udtørring af hydrogelen.

Hvis der er klippet i produktet, eller produktet på anden måde er beskadiget, må det ikke anvendes.

Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget

Må ikke udsættes for sollys.

Skal opbevares horisontalt.

## Advarsler

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for brugeren.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

## Anvendelse


### Forberedelse

1. Rens såret i henhold til sædvanlige procedurer, f.eks. med lunkent vand eller fysiologisk saltvand.
2. Tør forsigtigt huden omkring såret.
3. Hvis der anvendes film, creme, salve eller et lignende produkt, skal huden være helt tør, før bandagen påsættes.


### Påsætning

4. Vælg en bandage, hvor den absorberende pude overlapper sårkanten med mindst 1-2 centimeter.
5. Biatain Super, Klæbende: Anvend beskyttelsesfilmen for at undgå at røre ved bandagen og sikre aseptisk påsætning. Fjern først beskyttelsesfilmen, og læg den klæbende side mod såret. Fjern til sidst dækstykket.
6. Biatain Super, Ikke-klæbende: Påsæt siden med sårkontaktlaget ned mod såret. Der kræves en sekundær bandage til fiksering.

## Aftagning

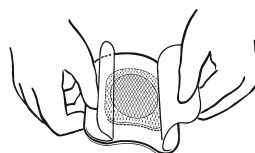


Biatain Super, Klæbende

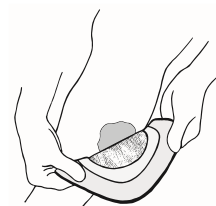

Biatain Super, Ikke-klæbende

7. Produktet skal skiftes, når det er klinisk indiceret, eller når den absorberende pude er fyldt med sårvæske.
8. Ved aftagning af Biatain Super, Ikke-klæbende, skal fikseringen fjernes, før bandagen forsigtigt løftes væk fra såret.
9. Biatain Super, Klæbende, tages af ved forsigtigt at løse den klæbende kant, før bandagen løftes væk fra såret. Det anbefales at skubbe huden væk fra bandagen fremfor at trække bandagen væk fra huden.

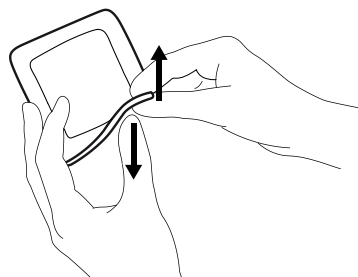

## Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug, og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det må ikke skylles ud i toiletet.

## Symboler



Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget



Indeholder ikke naturgummilatex