

Physiotulle Ag bandage



IFU23312957 v.8 Coloplasts logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S.
© [2012-06] Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Advarsel

Genbrug af dette engangsprodukt indebærer en potentiel risiko for brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Forbehold

Hvis Physiotulle- Ag bandage anvendes til sår, som helt eller delvis skyldes arteriel insufficiens, eller diabetiske sår (primært underben eller fod), skal såret tilses hyppigt af en sundhedsfagligt uddannet person.

I tilfælde af mistanke om allergisk reaktion skal der indhentes yderligere oplysninger fra Coloplast. Endvidere må Physiotulle Ag ikke anvendes til patienter med kendt overfølsomhed over for sølv eller sulfonamides.

Physiotulle- Ag bandage skal fjernes før strålebehandling eller undersøgelser, hvori røntgen, ultralyd, diatermi eller mikrobølger indgår.

Det er ikke påvist, at der kan anvendes andre rensningsmidler end fysiologisk saltvand eller postevand sammen med Physiotulle Ag.

Det er ikke påvist, at Physiotulle Ag bandage kan anvendes sammen med enzymatiske debrideringsmidler.

Det er ikke påvist, at Physiotulle Ag bandage kan anvendes til gravide, ammen- de eller børn.
Physiotulle – AG må ikke anvendes til børn med en legemsvægt under 10 kg.

Hvis der fortsættes med Physiotulle - Ag bandage i længere tid, anbefales det, at tilstanden vurderes månedligt af en sundhedsfagligt uddannet person. Klinikere/læger og sygeplejersker skal være opmærksomme på, at der foreligger meget begrænsede data, for længerevarende og gentagen anvendelse af produkter, der indeholder sølv.

Det anbefales, at der anvendes maksimalt 6 (15 x 15) bandager dagligt til voksne.

Physiotulle Ag bandage må ikke anvendes sammen med andre sølvholdige produkter.

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter med stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion. Der er rapporteret transitorisk leukopeni ved behandling af store brandsår med sølvsulfadiazin.

Physiotulle Ag bandage kan give en forbigående misfarvning af sårbunden. Misfarvningen kan fjernes ved forsigtig vask.

Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget.

Physiotulle Ag skal opbevares horisontalt.

Holdes væk fra sollyset.

Coloplast påtager sig intet ansvar for tilskadekomst eller andet tab, der måtte opstå ved anvendelse af dette produkt i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Indikationer

Physiotulle Ag bandage anvendes både til lavt og kraftigt væskende sår. Derudover kan bandagen anvendes til sår med forsinket sårheling på grund af bakterier eller hvor der er risiko for infektion.

Hvis såret er inficeret, skal bandagen anvendes under tilsyn af uddannet sundhedspersonale.

I tilfælde af klinisk infektion erstatter topisk sølv ikke systemisk eller anden hensigtsmæssig infektionsbehandling.

Physiotulle Ag bandage anvendes til kroniske sår som fx bensår, tryksår og diabetiske fodsår. Bandagen kan også anvendes til akutte sår som for eksempel 2.-gradsforbrændinger, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger.

Physiotulle Ag bandage reducerer lugtgener, der skyldes bakterier i såret.

Physiotulle Ag bandage er velegnet under kompressionsbehandling.

Beskrivelse

Physiotulle Ag bandage er et ikke-klæbende, sterilt, fugtigt sårkontaktlag med sølvsulfadiazin som den aktive komponent. Det består af et tæt vævet polyesterstof, som er imprægneret med hydrokolloidpartikler (CMC) og parafin-gel. Sølvsulfadiazinet er jævnt fordelt i parafin-gelen.

Ved sårkontakt absorberer de hydrokolloide partikler eksudatet, og der frigives sølv til sårbunden. Der frigives sølv fra bandagen i hele dens levetid. Hvor meget afhænger af den mængde eksudat, der er til stede. De hydrokolloide partikler og parafin-gelen danner et fugtigt sårhelingsmiljø, således at bandageskift sker smertefrit.

Sølvsulfadiazin har en bredspektret antibakteriel virkning og er effektivt mod både gramnegative og grampositive bakterier.

Vejledning

1. Skyl såret med fysiologisk saltvand eller postevand i overensstemmelse med normal praksis.
2. Tør forsigtigt huden omkring såret i overensstemmelse med normal praksis.
3. Det bedste resultat opnås, når der vælges en Physiotulle Ag bandage, som når mere end 1 cm ud over sårkanten. Physiotulle Ag bandagen skal fikseres med en sekundær bandage. Der skal anvendes en absorberende bandage, som afhængigt af mængden af eksudat kunne være en Biatain eller Comfeel bandage.
4. Physiotulle Ag bandage bør skiftes mindst hver tredje dag afhængigt af sårstatus.
5. Hvor længe der skal fortsættes med bandagerne afhænger af, hvordan sårhelingen skrider frem.

Hvis der fortsættes med Physiotulle Ag bandage i længere tid, anbefales det, at såret re-vurderes månedligt af en sundhedsfagligt uddannet personale.

Physiotulle Ag bandager er MR-sikre og MR-kompatible op til 3 tesla og kan derfor blive siddende under MR-scanning (tesla: enheden for et magnetfelts styrke).

Symboler

WO

Produktionsordre. Produktionsnummer til identificering af en specifik ordres emballage. (LOT-nummer henviser til produktionsserie).



Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget.