



## Hydrogel Blister Bandage

- Steril Hydrogel Blister Bandage
- Til engangsbrug
- Steril – Gammabestrålet
- MÅ IKKE anvendes, hvis posen er beskadiget eller åbnet før brug

ApodanNordic A/S  
Lyngsø Alle 3 · 2970 Hørsholm  
Tlf. 32 97 15 25  
www.apodannordic.dk

Ref #	Str., cm	Antal/ æske	Æsker/ karton
ApoCure Hydrogel – med klæbekant			
021525	7,5 x 4,5*	50	8

\*Oval bandage

SE 2657. Ver.: 2017.06



DA

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Den sterile ApoCure Hydrogel Blister Dressing har en blid, men sikker vedhæftning til det omgivende huden uden at strippe epidermis eller forårsage smerte ved bandageskift.

Hydrogelen sikrer at dressingen ikke klæber til såret og minimerer traume og smerte ved skift af dressing.

Den sterile ApoCure Hydrogel Blister Dressing er en vandtæt og bakteriel barriere.

### INDIKATIONER:

ApoCure Hydrogel Blister Dressing kan anvendes til behandling af blæret huden som følge af følgende:

1. Friktion.
2. Mindre husstand forbrændinger.
3. Sammenklemt hud.

### KONTRAINDIKATIONER:

Kendt overfølsomhed over for selve produktet eller dets komponenter, herunder glycerin og acryl klæbemiddel. Ikke til brug på stærkt blødende sår eller tredje grads forbrændinger.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE:

1. Rengør såret hvis det er nødvendigt og aftør den omgivende intakte hud.
2. Udtag den sterile dressing fra indpakningen.
3. For at pålægge dressingen, fjern først den hvide liner der dækker klæbeområdet.
4. Sørg for at hydrogelen dækker hele det beskadigede område og klæber kun er på intakt og ubeskadiget hud.
5. Dressingen pålægges og glattes på plads.
6. Når dressingen er påsat, fjernes derefter den øverste liner og det kontrolleres at dressingen sidder korrekt.
7. Kontroller blæren regelmæssigt. Bandagen skiftes så ofte det er nødvendigt, dog minimum hver 2-5 dag.
8. Hvis Blister dressingen er svær at fjerne, kan den vædes med steril saltvandsopløsning.
9. ApoCure Hydrogel Blister dressing må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

### FORSIGTIGHED:

**Advarsel;** Sterilitet af bandagen er intakt, medmindre posen er beskadiget eller åbnet før brug. **MÅ IKKE** anvendes, hvis en af delene har fundet sted.

1. Produktet er kun beregnet til engangsbrug.
2. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
3. I tilfælde af intolerance over produktet, fjern og rengør området omhyggeligt.
4. Såret skal inspiceres under skift af dressing.
5. Hvis der er tegn på infektion bør en læge konsulteres for den rette medicinske behandling.
6. Kontroller såret regelmæssigt.
7. Forbindingen bør skiftes så ofte som det af sårets tilstand dikterer, men som en generel regel bør forbindingen udskiftes efter 3-5 dage, eller når forbindingen bliver klar.

### OPBEVARING:

Opbevares tørt og ved rumtemperatur (0-30°). Produktet er steriliseret ved anvendelse af gamma-bestråling.