

Skumbandage med sølv



23313676, V3 Coloplasts logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S.

© [2013-05.] Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, Høldedam 1, 3050 Humlebæk.

Indikationer

Biatain Silicone Ag er en steril antibakteriel bandage af polyuretanskum med ioniseret sølv som aktiv komponent, som er beregnet til fugtig sårheling og håndtering af sårvæske.

Biatain Silicone Ag:

- anvendes til en bred vifte af væskende sår, herunder bensår, tryksår og diabetiske fodsår med forsinket heling på grund af bakterier, eller hvor der er risiko for infektion
- kan anvendes til andengradsforbrændinger, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger med forsinket heling på grund af bakterier, eller hvor der er risiko for infektion
- kan efter sundhedsfagligt skøn anvendes til patienter, som er i behandling for en lokal eller systemisk infektion
- egnet til brug i kombination med kompressionsterapi
- kan reducere lugtgener forårsaget af bakterier i såret
- kan blive siddende i op til syv dage afhængigt af mængden af sårvæske, bandagens tilstand og sårtypen
- kan anvendes til beskyttelse af de indicerede sårtyper under hele sårhelingsprocessen.

Information

Biatain Silicone Ag er en absorberende og selvklæbende bandage med silikone på skumpuden og klæbekanten.

Biatain Silicone Ag består af

- et perforeret blødt sårkontaktlag af silikone
- et absorberende lag af polyuretanskum med sølv
- en ydre film, som er semipermeabel, men bakterie- og vandtæt.

Biatain Silicone Ag:

- indeholder et antibakterielt sølvkompleks, som er jævnt fordelt i skummet. Sølvet frigives til sår bunden, når det kommer i kontakt med sårvæske.
- er effektivt mod bakteriestammer, som man ved modvirker sårhelingen, fx *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* og *β-hæmolytiske streptokokker*.

Søg sundhedsfaglig hjælp i tilfælde af en allergisk reaktion.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Forsigtig

Diabetiske sår eller sår, der alene eller i væsentlig grad er forårsaget af arteriel insufficiens, bør jævnligt tilses og behandles af en læge eller sårsygeplejerske i henhold til lokale procedurer.

Biatain Silicone Ag må ikke anvendes til patienter med kendt overfølsomhed over for sølv.

Det anbefales, at en sundhedsfagligt uddannet person foretager en klinisk vurdering, hvis produkter, som indeholder sølv, ønskes anvendt længere end 30 dage.

Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget.

Biatain Silicone Ag må ikke anvendes sammen med oxiderende opløsninger, fx hypoklorit- og hydrogenperoxidopløsninger. Kontroller, at eventuelle andre fordampende opløsninger er helt tørret bort, før bandagen anlægges.

Biatain Silicone Ag skal fjernes før strålebehandling eller undersøgelser, hvori der

indgår røntgen, ultralyd, diatermi eller mikrobølger.

Produktet kan blive siddende under en MR-scanning. Det er kompatibelt op til 3 Tesla. (Tesla: enheden for et magnetfelts styrke).

Biatain Silicone Ag er ikke testet på børn, gravide eller ammende.

Biatain Silicone Ag er ikke testet sammen med enzymholdige oprensningsmidler.

Advarsler

Genanvendelse af dette engangsprodukt indebærer en potentiel risiko for, at brugeren kommer til skade. Oparbejdning, vask, desinficering og gensterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed øge risikoen for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Sådan anvendes Biatain Silicone Ag

Forberedelse

1. Rens såret i overensstemmelse med normal procedure, fx med lunkent vand eller fysiologisk saltvand.
2. Tør forsigtigt huden omkring såret.
3. Hvis der anvendes nogen form for film, creme, salve eller lignende produkter, skal huden være helt tør, før bandagen anlægges.

Anlæggelse

4. Vælg en bandage, hvor skumpuden når mindst 1-2 centimeter ud over sårkanten.
5. 'Håndtagene' skal benyttes for at undgå berøring af bandagen og sikre aseptisk anlæggelse. Fjern beskyttelsesfilmen i midten, og læg bandagens skumdel over såret. Fjern derefter beskyttelsesfilmen i siderne, idet bandagen lægges på.



6. Sæt den klæbende side på såret. Hvis såret kun væsker lidt, kan produktet fugtes med steril, fysiologisk saltvand, før det anbringes på såret. Forbigående misfarvning af sår bunden kan fjernes ved forsigtig vask.

Aftagning


7. Biatain Silicone Ag skal skiftes, når det er klinisk indiceret, eller når der er synlige tegn på, at sår væske nærmer sig kanten af bandagen.
8. Når bandagen skal fjernes, løftes hjørnerne forsigtigt bort fra såret. Det anbefales at løsne den selvklæbende kant, før bandagen løftes væk fra såret.



Bortskaffelse

9. Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det må ikke skylles ud i toiletet.

Symboler

| | |
|---|--|
|  | Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget |
|---|--|