


 **smith&nephew**

**CARBONET<sup>®</sup>**

Absorbent Dressing Containing  
Activated Charcoal Cloth

Designet til behandling af  
ildelugtende sår

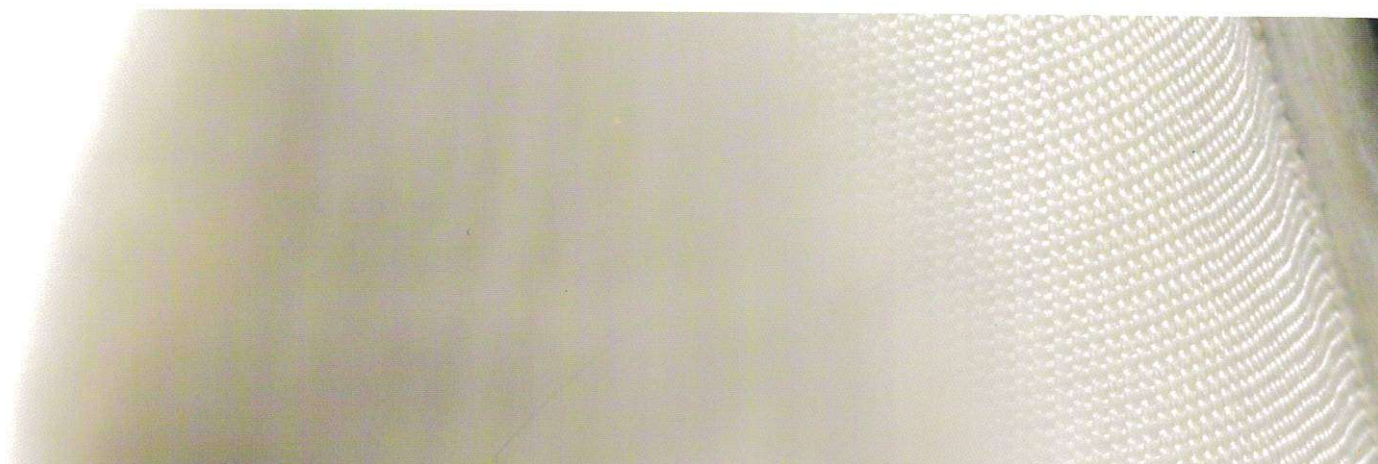

# CARBONET<sup>®</sup> er designet til behandling af ildelugtende sår

CARBONET er konstrueret til at gøre sårbehandlingen nemmere og reducere plejetiden ved behandling af ildelugtende og betændte sår. Fordelene ved aktivt kul er her indarbejdet i en absorberende og ikke-klæbende forbindelse. Forbindingen skaber et godt sårhelingsmiljø, og er nem og økonomisk at bruge.

## Fordele

### Absorberende

Absorberer det viskøse ekssudat, der typisk ses ved bensår og andre kroniske sår.

### Indeholder aktivt kul

Aktivt kul har en velkendt evne til at neutralisere bakterier og indkapsle lugt fra inficerede eller kontaminerede sår.

### Ikke-klæbende sårkontaktlag

TRICOTEX<sup>®</sup>-laget har helt enestående ikke-klæbende egenskaber.

### Let at aplikere

Den sammensatte struktur i CARBONET giver lige så mange fordele som et kontaktag, en absorberende forbindelse og et lugt-absorberende materiale tilsammen, men er meget hurtigere og lettere at aplikere end 3 forskellige forbindelser.

### Formbar

Forbindingen er meget formbar og kan tilpasses selv vanskeligt placerede sår. Det er muligt at klippe i forbindelsen.

### Økonomisk

CARBONET's sammensætning betyder, at man ikke behøver at anvende 3 separate forbindelser. Dette gør forbindelskift lettere og sparer således dyr plejetid.

## Indikationer

Væskende, inficerede og ildelugtende sår.

### F.eks:

1. Venøse skinnebessår;
2. Fungøse carcinomer (f.eks: brystet);
3. Fækal fistula;
4. Inficerede operationssår.

## Applikation

1. Foretag revision af såret.
2. Rens såret med sterilt saltvand eller antiseptisk opløsning.
3. Anlæg forbindelsen med den skinnende side direkte på såret.

## Præsentation

Hver forbindelse er individuelt pakket og gamma steriliseret.



### Produktsortiment

Varenr.	Størrelse	Karton
7064	10cm x 10cm	10
7065	10cm x 20cm	10

Wound Management [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)  
Smith & Nephew  
Nærum Hovedgade 2  
Postboks 30  
2850 Nærum

T 45 80 61 00  
F 45 80 61 51

Trademarks of Smith & Nephew  
6855/CARBONET/SS/GLOBAL/0404/V3