

## Mepiform®

Selvklebende blød silikoneforbinding til arbehandling



### Produktbeskrivelse

Mepiform er en selvklebende, tynd, diskret og fleksibel bandage. Bandagen har et Safetac®-kontaktag, som er en unik klæbeteknologi. Det minimerer smerte hos patienter og traume på den omkringliggende hud ved bandageskift.

Mepiform består af:

- Et åndbart og brusetæt laminatlag (polyuretanim og viskose nonwoven)
- Et kontaktag bestående af blød, selvklebende silikone (Safetac®)

Materialeindhold:

Polyakrylat, polyuretan, silikone og viskose

### Anvendelsesområde

Mepiform er beregnet til behandling af gamle og nye hypertrofiske og keloide ar. Produktet kan også bruges profylaktisk på lukkede sår for at forebygge hypertrofiske eller keloide ar.

### Forholdsregler

- Mepiform må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for de materialer/komponenter, der indgår i produktet.
- Hvis der forekommer maceration eller udsæt, skal du fjerne bandagen og lade huden hele. Indtil symptomerne er forsvundet, og derefter fortsætte behandlingen i gradvist længere og længere tid. Hvis symptomerne fortsætter, skal behandlingen stoppes, og en læge spørges til råds.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget eller har været åbnet før anvendelse. Må ikke resteriliseres.

### Brugsanvisning

Mepiform kan bruges af ikke-fagpersoner under tilsyn af sundhedspersonale.



#### Applicering

1. Åbn pakken og tag bandagen ud.
2. Klip den om nødvendigt til i en passende størrelse og lad der være en overlappning på mindst 1 cm.
3. Når du applicerer Mepiform, skal du sørge for, at området er tørt. Ved brug sammen med salve eller creme skal det sikres, at bandagen dækker et område, der går ud over det cremesmurte område.
4. Fjern beskyttelsesfilmen, og applicer Mepiform på arret.  
Undgå at strække Mepiform, der appliceres hen over led.

#### Bandageskift og aftagning.

1. Mepiform bør optimalt sidde 24 timer i døgn. Fjern bandagen én gang om dagen for at inspirere og vaske huden. Bandagen kan derefter appliceres igen.
2. Mepiform bør under normale omstændigheder skiftes hver 7. dag, eller når bandagens klæbeevne ikke længere er tilstrækkeligt god.
3. Mepiform er brusetæt.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

### Andre oplysninger

Enhver alvorlig ulykke relateret til brugen af Mepiform skal rapporteres til Mölnlycke Health Care.

Mepiform® og Safetac® er registrerede varemærker tilhørende Mölnlycke Health Care AB.