

Mepilex® Transfer med Safetac®-teknologi

Væskegennemtrængelig bandage af blød silikone



Produktbeskrivelse

Mepilex Transfer består af:

1. et sårkontaktlag af blød silikone (Safetac®)
2. en tynd, fleksibel absorberende pude af polyuretanskum

Safetac er en unik og patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret og den omkringliggende hud.

Mepilex Transfer er blød, tynd og meget formbar, hvilket gør det nemmere at holde bandagen i kontakt med sårets overflade og den omkringliggende hud, selv på vanskeligt tilgængelige og ujævne områder.

Mepilex Transfers struktur gør, at væske kan overføres vertikalt op i en sekundær absorberende pude.

Mepilex Transfer bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø sammen med en passende sekundær bandage og minimerer risikoen for maceration.

Anvendelsesområde

Mepilex Transfer er udviklet til en bred vifte af væskende sår, der er vanskelige at bandagere.

Mepilex Transfer kan desuden bruges som beskyttelseslag på sår, der ikke væsker, og/eller på større områder med skrøbelig hud. Mepilex Transfer kan anvendes under kompressionsbandager.

Brugsanvisning

1. Rens såret efter normale procedurer.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Fjern beskyttelsespapiret, og applicer Mepilex Transfer med den klæbende side mod såret. Stræk ikke bandagen.
4. For at opnå det bedst mulige resultat skal Mepilex Transfer overlæppe den tørre omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for de mindste størrelser (størrelser op til 12,5 x 12,5 cm) og 5 cm for de største størrelser med det formål at beskytte den omkringliggende hud mod maceration og hudatstråning og at fiksere bandagen sikkert. Mepilex Transfer kan eventuelt klippes til.

5. Applicer en passende sekundær bandage for at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø:

- Til ikke-væskende eller let væskende sår bruges en åndbar filmbandage til fiksering.
- Til moderat eller kraftigt væskende sår bruges en sekundær absorberende bandage oven på Mepilex Transfer. Fiksér Mepilex Transfer og den sekundære bandage med en bandage eller en anden form for fiksering.

Mepilex Transfer kan blive siddende i flere dage afhængigt af sårets og den omkringliggende huds tilstand, eller hvad de kliniske retningslinjer anbefaler. I begyndelsen kan det være nødvendigt at skifte bandagen hyppigere, fordi en ændring i behandlingen kan resultere i en forøgelse af væske i starten.

Mepilex Transfer kan anvendes under kompressionsbandager.

Mepilex Transfer kan anvendes sammen med geler.

Forholdsregler

- Bandagen må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for bandagen eller dens komponenter.
- I tilfælde af tegn på klinisk infektion bør du konsultere en læge og få en passende infektionsbehandling.
- Brug ikke Mepilex Transfer sammen med oxiderende midler som f.eks. hypochloritopløsninger eller hydrogenperoxid.

Opbevaring og bortskaffelse

- Mepilex Transfer bør opbevares tørt ved temperaturer under 35 °C.
- Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

Andre oplysninger

Det polyuretanskum, der anvendes i produktet, kan skifte farve til en mere gullig farve, når det udsættes for lys, luft og/eller varme. Farveændringen har ingen indflydelse på produktets egenskaber, når blot det anvendes før udløbsdatoen.

Må ikke genbruges. Hvis produktet genanvendes, kan det begynde at fungere dårligere, og der kan forekomme kryskontamination.

Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage er beskadiget eller har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres.

Hvis produktet anvendes efter udløbsdatoen, kan der ikke garanteres for produktets egenskaberne.

Mepilex og Safetac er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.