

Mepilex®

Blød skumbandage af silikone

da

Produktbeskrivelse

Mepilex er en meget formbar bandage, der absorberer væske, opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø og minimerer risikoen for maceration. Bandagen har et Safetac®-sårkontaktlag, som er en unik klæbeteknologi. Det minimerer smerte hos patienterne og traume mod såret og den omkringliggende hud ved bandageskift.

Mepilex består af:

- et sårkontaktlag af blødt silikone (Safetac)
- en fleksibel, absorberende pude af polyuretanskum
- en filmbagside af polyuretán, der er åndbar og vandtæt

Materialerindhold:

Silikone, polyuretán

Anvendelsesområde

Mepilex er udviklet til en bred vifte af væskende sår - såsom ben- og fodsår, tryksår og traumatisk sår, f.eks. hudflånger og sekundært ophelende sår.

Forholdsregler

- Må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for bandagen eller dens materialer.
- Må ikke bruges sammen med oxiderende midler som f.eks. hypochloritopløsninger eller hydrogenperoxid.
- Hvis der iagttages tegn på klinisk infektion, f.eks. feber, eller hvis såret eller det omkringliggende hudområde bliver rødt, varmt eller hævet, skal du kontakte sundhedsfagligt personale vedrørende passende behandling.
- Må ikke genanvendes. Hvis produktet genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminering.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget eller har været åbnet før anvendelse. Må ikke resteriliseres.

Brugervejledning

Mepilex kan bruges af ikke-fagpersoner under tilsyn af sundhedspersonale.

1. Rens såret i henhold til de kliniske retningslinjer.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Vælg en passende bandagestørrelse. Mepilex skal overlappe den tørre, omkringliggende hud med mindst 1-2 cm, når der benyttes mindre størrelser (op til 12,5x12,5 cm), og 3-5 cm, når der benyttes større størrelser. Dette for at beskytte den omkringliggende hud mod maceration og for at fiksere bandagen på sikker vis. Mepilex kan klippes til efter behov, så den passer til forskellige sårformer, sårstørrelser og sårplaceringer.
4. Fjern den tørste beskyttelsesfilm, og applicer bandagen med den klæbende side mod såret.
5. Fjern den resterende beskyttelsesfilm, og udglat bandagen mod huden. Stræk ikke bandagen.
6. Hvor det er nødvendigt, kan Mepilex fikseres med en bandage eller anden fiksering.

Intervaller for bandageskift kan være flere dage. Skift bandagen, inden den er helt mættet, ved tegn på lækage eller i henhold til klinisk praksis.

Mepilex kan anvendes under kompressionsbandager og sammen med geler.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

Andre oplysninger

Det polyuretanskum, der anvendes i produktet, kan skifte farve til en mere gullig farve, når det udsættes for lys, luft og/eller varme. Farveændringen har ingen indflydelse på produktets egenskaber, når blot det anvendes før udløbsdatoen. Enhver alvorlig ulykke relateret til brugen af Mepilex skal rapporteres til Mölnlycke Health Care.

Mepilex® og Safetac® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.