

Mepore® Film

Transparent, åndbar, klæbende filmbandage



Produktbeskrivelse

Mepore Film er en steril, transparent, åndbar og klæbende filmbandage.

Mepore Film består af:

- en transparent polyuretanim belagt med opløsningsmiddelbaseret akrylatklæb. Klæbeområdet er dækket af en trykt beskyttelsesfilm.
- en appliceringsramme og flige af silikonebelagt papir.

Bandagens materialeindhold: Akrylatklæb og polyuretanim

Anvendelsesområde

Mepore Film er beregnet til beskyttelse af intakt hud og overfladiske sår. Mepore Film kan også anvendes til fiksering af medicinsk udstyr som f.eks. sårbandager, slanger og kanyler.

Advarsel

Mepore Film må ikke anvendes til fiksering af andre livreddende anordninger end dem, der er nævnt under anvendelsesområde.

Forholdsregler

Anvend ikke Mepore Film på patienter med kendt overfølsomhed over for akrylatklæb eller andre materialer/bestanddele, der indgår i produktet.

Vær ekstra forsigtig ved applicering på skrøbelig hud. Anvendelse på skrøbelig hud kan forårsage hudirritation.

Stræk ikke bandagen under applicering. Må ikke strækkes ved applicering, da det kan medføre blærer.

Mepore Film bør ikke erstatte suturer eller andre primære sårlukningsmetoder.

I tilfælde af tegn på infektion, f.eks. feber, eller hvis såret eller det omkringliggende hudområde bliver rødt, varmt eller hævet, kontaktes sundhedspersonalet med henblik på passende behandling.

Må ikke genbruges. Hvis produktet bruges flere gange, kan dets effektivitet blive nedsat, og der kan forekomme krydskontaminering.

Steril. Må ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget eller har været åbnet før anvendelse. Må ikke steriliseres igen.



Brugervejledning

Mepore Film kan bruges af ikke-fagpersoner under tilsyn af sundhedspersonale.

1. Rens appliceringsområdet i overensstemmelse med klinisk praksis. Efter grundigt. For at sikre klæbeevnen må der ikke anvendes fugtighedscreme på huden, som bandagen dækker.
2. Vælg en bandagestørrelse, der overlapper sårområdet eller det medicinske udstyr med mindst 1-2 cm for at sikre korrekt hæftning på tør, sund hud. Jern den trykte beskyttelsesfilm, og applicer bandagen med den klæbende side mod huden uden at strække bandagen.
3. Fjern papirrammerne, og træk de to hvide flige af. Tryk let på produktet for at sikre en tilstrækkelig hæftning på huden.
4. Ved fjernelse skal du holde i kanten og langsomt trække bandagen af huden i hårenes gøretning.

For at forhindre friktion, der kan forvolde skader på huden, skal det omhyggeligt sikres, at Mepore Film ikke strækkes under applicering. Når den lægges på over led, skal den omhyggeligt lægges på således, at den ikke hæmmer leddets bøjelighed.

Mepore Film skal skiftes, når den begynder at falde af, hvis den er beskadiget, eller hvis klinisk praksis indikerer dette.

Bortskaffelse skal ske i henhold til lokale miljømæssige procedurer.

Andre oplysninger

Enhver alvorlig ulykke relateret til brugen af Mepore Film skal rapporteres til Mölnlycke Health Care og til dine lokale, kompetente myndigheder.

Mepore® er et registreret varemærke tilhørende Mölnlycke Health Care AB