

Mesorb®

Absorberende cellulosebandage med væskeafvisende lækagebarriere



Produktbeskrivelse

Mesorb er en højabsorberende cellulosebandage med en kerne af cellulosemasse, en væskeafvisende nonwoven lækagebarriere og et nonwoven sårkontaktlag, der er fremstillet af polypropylen.

Mesorb er udviklet til at kunne absorbere og holde på store mængder eksudat i cellulosekernen. Den væskeafvisende nonwoven lækagebarriere forhindrer uønsket kontaminering af såret og beskytter tøj og sengetøj mod udsivende eksudat. Det nonwoven sårkontaktlag i polypropylen absorberer ikke eksudat, hvilket reducerer risikoen for, at bandagen hænger fast i såroverfladen.

Anvendelsesområde

Mesorb kan anvendes på moderat til kraftigt væskende sår.

Mesorb kan anvendes som primærbandage (direkte på såret) eller som sekundær bandage, hvor der er behov for høj absorptionskapacitet.

Forholdsregler

Mesorb bør ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for bandagen eller dens komponenter.

Må ikke genbruges. Hvis produktet genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminering.

STERIL. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage er beskadiget eller har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres.

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Hvis produktet anvendes efter udløbsdatoen, kan der ikke garanteres for produktets egenskaberne.

Brugsanvisning

Applicering:

1. Rens forsigtigt såret, hvis nødvendigt, og tør den omkringliggende hud.
2. Læg Mesorb direkte på sårområdet eller på den valgte primære bandage med bandagens hvide side på såret og med mindst 1 cm overlappning på den omkringliggende hud. Den blå side af materialet skal vende opad.
3. Fikser med en passende fiksering.
4. Mesorb kan anvendes under kompression.

Bandageskift:

Mesorb skal skiftes i henhold til sårets kliniske tilstand, eller før bandagen er mættet med eksudat. Hvis sårets tilstand forværres, skal behandlingen afbrydes, og sundhedspersonalet kontaktes.

