

## Melgisorb® Ag

Antimikrobiel alginatbandage

da

### Produktbeskrivelse

Melgisorb Ag er en meget absorberende, steril, uvævet antimikrobiel pude, der består af et calciumalginat med høj G (glucuronsyre), carboxymethylcellulose (CMC) og et ionisk sølvkompleks (selvnatrumhydrogen zirconiumtostat, vægt/vægt 0,5 % Ag), som afgiver sølvioner, hvis der er sårvæske til stede i såret. Efterhånden som sårvæsken absorberes, danner alginatet en gel, som fremmer den autolytiske debridering, mens det fugtige miljø opretholdes med det formål at få optimal sårhelning. Gelen sikrer optimal aftagning, uden at det helende væv beskadiges.

Sølvionerne, der afgives ved tilstedeværelse af sårvæske, er et antimikrobielt stof, som er effektivt mod et bredt spektrum af mikroorganismer, der hyppigt associeres med den bakterielle kolonisering og inficering af sår, i op til fjorten (14) dage baseret på forsøg in-vitro. Melgisorb Ag kan desuden reducere luften fra inficerede sår på grund af produktets effektive antimikrobielle egenskaber.

Melgisorb Ag er en effektiv barriere mod mikroorganismeres indtrængen.

### Indikationer

Melgisorb Ag er indiceret til brug ved behandling af alle moderat til alvorligt væskende sår af partiel til fuld tykkelse, herunder:

- postoperative sår
- traumesår (dermale læsioner, traumeskader eller incisioner)
- bensår
- tryksår
- diabetiske sår
- transplantat- og donorsteder
- kavitetssår
- overfladiske brandsår og sår af delt tykkelse

Da Melgisorb Ag indeholder alginat, kan produktet være med til at støtte styringen af mindre blødnings- i overfladiske sår.

Dette produkt kan desuden bruges under kompressionsbandager.

Melgisorb Ag kan bruges ved behandling af inficerede sår eller sår, i hvilke der er en øget risiko for infektion under den medicinske overvågning af sundhedspersonale.

Melgisorb Ag må udelukkende anvendes til udvortes brug.

### Kontraindikationer

Melgisorb Ag er indiceret til følgende anvendelser:

- på tørre eller let væskende sår
- til personer med kendt overfølsomhed over for alginater eller sølv
- for at styre kraftig blødning

### Forholdsregler

Bandagen kan klæbe, hvis den bruges på tørre eller meget let væskende sår. Hvis bandagen klæber og er svær at fjerne, kan man fugte den med sterilt saltvand, før den aftages.

Bandagen kan komme til at virke dårligere, hvis der benyttes mineraloliebaserede salver.

Undgå kontakt med elektroder eller ledende geler under elektrokardiogrammer (EKG), elektrokardiogrammer (IEKG) og elektroencefalogrammer (EEG).

Bandagen skal fjernes, før patienten udsættes for undersøgelser, der omfatter

MR-scanning (Magnetic Resonance Imaging).

I tilfælde af klinisk infektion erstatter topisk sølv ikke behovet for systemisk behandling eller anden passende infektionsbehandling.

Læger og sundhedspersonale skal være opmærksomme på, at der kun findes meget begrænsede data om lang tids eller gentagen brug af bandager, indholdende sølv, især på børn og nyfødte.

Melgisorb Ag er beregnet til kort tids anvendelse i op til 30 dage.

### BRUGSANVISNING

#### Klargøring på stedet

- Debrider efter behov og skyl sårstedet i overensstemmelse med standardprotokollen.
- Fjern overskydende optøsning fra den omkringliggende hud.

#### Valg af bandage

- Udvælg Melgisorb Ag i en størrelse, der er lidt større end såret.

#### Anlæggelse af bandage

1. Klip bandagen (med en steril saks), eller fold den, så den passer til såret. Bortskaf eventuelle resterende bandagematerialer, da der er risiko for kontaminering.
2. Anlæg bandagen direkte på såret. Fyld dybe sår løst op, idet du sikrer, at bandagen ikke overlapper sårkanterne.
3. Dæk og fastgør Melgisorb Ag med en sekundær ikke-okklusiv bandage.

#### Bandageskrift og aftagning

1. Melgisorb Ag kan blive siddende på stedet i op til 7 dage. Bandageskriftenes hyppighed afhænger af sårtilstanden og sårvæskniveauet. I starten kan det være nødvendigt at skifte bandagen for hver 24 timer.
2. Anlæg en ny Melgisorb Ag, når den sekundære bandage har nået sin absorptionskapacitet, eller når god sårplejepsikis siger, at bandagen skal skiftes.
3. For anlæggelsen fjernes den sekundære bandage forsigtigt.
4. Hvis såret virker tørt, kan bandagen møttes med almindeligt sterilt saltvand inden aftagningen.
5. Fjern forsigtigt bandagen fra såret, og bortskaf den i overensstemmelse med lokale procedurer og retningslinjer herfor.
6. Skyl eventuelt såret i overensstemmelse med standardprotokollen, før den nye bandage anlægges.

#### Inficerede sår

1. Hvis såret er inficeret, skal en passende medicinsk behandling iværksættes.
2. Anlæggelse af Melgisorb Ag kan fortsættes efter lægens/Klinikerens skøn.

Melgisorb Ag anvender ikke dyrevæv. Melgisorb Ag er ikke fremstillet af naturgummilatex.

#### Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur (under 25 °C/ 77 °F).

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.

Melgisorb er et registreret varemærke, der tilhører Mölnlycke Health Care.