

Brugervejledning

Bemærk, at lokale hygiejneprocedurer skal følges både før og efter bandageskift.

1. Rens såret med en saltvandsopløsning eller vand i henhold til normal procedure.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Fjern beskyttelsespapiret, og applicer bandagen med den klæbende side mod såret. Stræk ikke bandagen.
4. For at opnå det bedste resultat skal Mepilex Border Ag's sårpude overlæppe sårkanterne med mindst 2 cm.

Mepilex Border Ag er beregnet til kortvarig behandling i op til 4 uger. Ved behandling over en længere periode anbefales en klinisk undersøgelse af en læge.

Bandageskift

Mepilex Border Ag kan sidde på såret i op til 7 dage, afhængigt af patienten, sårets og den omkringliggende hudts tilstand eller i følge de anbefalede kliniske retningslinjer.

I begyndelsen af behandlingen kan det være nødvendigt at skifte Mepilex Border Ag hyppigere. Det skyldes, at ændringer i behandlingen kan resultere i væskeforgøelse.

Forholdsregler

- Mepilex Border Ag bør anvendes under opsyn af kvalificeret sundhedspersonale.
- Må ikke anvendes på patienter med overfølsomhed over for sølv eller andre stoffer, som bandagen indeholder.
- Læger og sundhedspersonale skal være opmærksomme på, at der kun findes meget begrænsede data om lang tids eller gentagen brug af bandager, indeholdende sølv, især på børn og nyfødte.
- Mepilex Border Ag kan medføre kortvarig misfarvning af sårbunden og den omkringliggende hud.
- I tilfælde af klinisk infektion erstatter Mepilex Border Ag ikke behovet for systemisk behandling eller anden passende infektionsbehandling.



- Anvend ikke Mepilex Border Ag i forbindelse med strålebehandling eller undersøgelser, f.eks. røntgen, ultralyd, diatermi eller MR-scanning.
- Undgå kontakt med elektroder eller ledende gæler under elektroniske målinger, f.eks. elektrokardiogrammer (EKG) og elektroencefalogrammer (EEG).

- Anvend ikke Mepilex Border Ag sammen med itningsmidler som f.eks. hypokloritopløsninger eller brintoventile.
- Bortset fra saltvand eller vand er der ikke påvist interaktion mellem rensningsmidler og Mepilex Border Ag.
- Mepilex Border Ag's interaktion med topiske behandlinger er ikke påvist.
- Kun til udvortes brug.

- Må ikke genanvendes. Hvis produktet genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminering.

- Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage er beskadiget eller har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres.

- Hvis produktet anvendes efter udløbsdatoen, kan der ikke garanteres for produktets egenskaberne.

Opbevaring og bortskaffelse

- Mepilex Border Ag skal opbevares tørt og under 25°C og skal beskyttes mod direkte sollys.
- Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

Oplysninger om sølvindholdet

Sårpuden i Mepilex Border Ag indeholder 1,2 mg sølv pr. cm².

Mepilex og Safetac er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.