

## Mepore® Film & Pad

Absorberende flimbandage

da

### Beskrivelse

Mepore Film & Pad består af en transparent polyurethan film belagt med en polyakrylat klæb og en sårpude. Sårpuden er en absorberende viskosepude med et let-hæftende sårkontaktlag. Filmen er både luftgennemtrængelig og væskeafvisende, hvilket giver en barriere som beskytter mod gennemsvining og bakteriekontaminering. Mepore Film & Pad former sig efter kroppens konturer.

### Anvendelsesområde

Mepore Film & Pad er beregnet til let til moderat væskende sår, som fx. kirurgiske sår, snitsår og hudafskrabninger.

### Brugsvejledning

Applicering:

1. Åben den sterile pakning og tag bandagen ud.
2. Rengør appliceringsstedet. Tør den intakte omkringliggende hud.
3. Fjern beskyttelsesfilmen (trykt med 'Mepore') så klæben synliggøres.
4. Applicer Mepore Film & Pad og fjern papirrammen.
5. Fjern de to hvide papirstykker.

### Bandageskift og aftagning:

1. Bandagen kan ligge på såret i adskillige dage afhængigt af sårets/hudomgivelsernes tilstand og efter hvad god klinisk praksis indikerer.
2. Løft op i hjørnerne og træk forsigtigt filmen af langs hudoverfladen (i hårretningen).

### Skiftetrekvens

Skiftetrekvensen for bandageskift bør vurderes efter sårets tilstand og i henhold til accepteret klinisk praksis.

### Forholdsregler

Mepore Film & Pad bør ikke anvendes på personer, der er sensitive overfor akrylholdig klæb. Vær opmærksom på at bandagen ikke strækkes under applicering, så risikoen for mekanisk skade mod huden minimeres. Såret skal inspiceres for tegn på infektion i henhold til klinisk praksis. I tilfælde af klinisk tegn på infektion (smerte, rødme, hævelse eller usædvanlig lugt eller væske) skal anvendelsen af Mepore Film & Pad vurderes af en læge. Sterilt. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres. Hvis produktet genanvendes, kan dets ydeevne blive forringet, og der kan ske krydskontamination.

### Indpakning

Hver bandage er indpakket i sterile enkeltpakninger.

da