

Mepitac®

Blød silikone fikseringstape

Produktbeskrivelse

Mepitac er en fikseringstape belagt med blød silikone.

Tapen består af:

- Et blødt silikone kontaktag (Safetac)
- Et vævet tekstil
- En åndbar polyuretann film

Safetac Technology

Safetac er en patenteret blød silikone klæbeteknologi. Sårbandager med Safetac er atraumatiske bandager både under anvendelse og ved skift. Disse bandager er et stort fremskridt indenfor sårbehandling i retningen mod at minimere traume mod huden og minimere smerte hos patienten.

Egenskaber

Mepitac er en meget behagelig tape, og den er nem at påføre og aftage. Det bløde silikone lag giver en sikker fiksering og et atraumatisk skift – selv på behårede områder. Hvis der er behov for at inspicere eller reapplicere tapen, kan Mepitac aftages og påsættes igen. Mepitac efterlader ingen klæberester på huden.

Mepitac er en ideelle fikseringsløsning for patienter med sart og sensitiv hud. Mepitac er velegnet til patienter, hvor det er nødvendigt med gentagne påsætninger og aftagninger af tape på samme område f.eks. neonatal og dialyse patienter.

Mepitac er vandafvisende.

Anvendelsesområde

Mepitac er udviklet til fiksering af medicinsk udstyr som dræen, kanyler, slanger, elektroder, IV kanyler og forbindinger. Derudover giver Mepitac en blid beskyttelse af huden ved anvendelse under udstyr f.eks. kanyler.

Brugsanvisning

1. Huden skal være ren, tør og fri for fedtstoffer som f.eks. salve.
2. Klip et passende stykke tape med en saks.
3. Fjern beskyttelsesfilmen og påfør Mepitac uden at strække tapen.
4. Hvis det er nødvendigt at inspicere eller reapplicere, kan Mepitac aftages og påsættes igen.

Forholdsregler

Vedhæftningen kan mindskes, hvis Mepitac anvendes under fugtige forhold som f.eks. i kuvøse eller på patienter som har feber eller sveder meget.

Mepitac er ikke velegnet til fiksering af arterielle katetre og arterielle kanyler.

Hvis produktet genanvendes, kan dets ydeevne blive forringet, og der kan ske krydskontamination.

Mepitac og Safetac er varemærker registreret af Mölnlycke Health Care AB.

