

Barrierecreme



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugsanvisning

23325565 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes.©
2021-01-31

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebaek

Denmark

Tel: +45 49 11 11 11

Tilsigtet formål

Brava Barriere Creme er beregnet til beskyttelse af intakt hud omkring stomien, der er udsat for tarmindhold, urin og pus.

Indikationer

Brava™ Barriere Creme er indiceret til personer med en stomi.

Forholdsregler

Skal beskyttes mod sollys, da dette kan påvirke produktets kvalitet.

Information

Produktet forhindrer ikke klæbere i af klæbe fast.

Indholdsstoffer

vand, cetearylolivat, sorbitanolivat, tetrahydroxypropyl-ethylendiamin, konserveringsmiddel, emulgator

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Særlige opbevaringskrav

Bør ikke udsættes for sollys.

Sådan anvendes

Påfør forsigtigt et meget tyndt lag på den rene hud. Fjern overskydende creme med en serviet, inden stomiklæberen påføres.

Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald eller i henhold til lokale retningslinjer.

Produktet må ikke skylles ud i toiletet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik enhedsidentifikation



Må ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage