

## Klæbefjernerspray

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C.

### Information

Produktet er silikonebaseret og beregnet til genbrug. Produktet tørrer i løbet af sekunder og påvirker ikke fastklæbningen af andet udstyr.

Ingredienser: Indeholder en blanding af alkylsiloxaner.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

### Anvendelse

1. Sprøjt produktet på langs kanten af klæberen.

2. Efter et par sekunder fjernes klæberen forsigtigt. Gentag proceduren om nødvendigt.

### Bortskaffelse

Produktet bør bortskaffes sammen med andre sprayflasker i henhold til lokale regler.

### Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.



### Brugervejledning

23323495 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes.©  
2020-05-27

### Tilsigtet brug

Brava-klæbefjernerspray er beregnet til fjernelse af medicinske klæbere fra intakt hud.

### Forholdsregler

Undgå direkte brug på ikke-intakt hud, som f.eks. sårbunde og slimhinder (øjne, ører, næse, mund, vagina), da dette kan forårsage hudirritation.

Undgå direkte indånding, da dette kan give anledning til forbigående irritation af luftvejene.

Frarådes til brug hos for tidligt fødte spædbørn, nyfødte eller spædbørn under 4 kg på grund af dissers ikke-færdigudviklede hud.

Yderst brandfarlig aerosol – Fare

Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

## Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato.  
Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato.  
Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Producent



Se brugervejledning



Angiver den øvre temperaturgrænse,  
som det medicinske udstyr kan  
eksponeres for og stadig være sikkert  
at bruge



Forsigtig



Indikerer, at stregkoden indeholder  
Unik Udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number)  
GTIN-varenummer



Bør ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage



Overensstemmelse med  
aerosoldirektivet 75/324/EØF



Yderst brandfarlig