

## Klæbefjerner Serviet



Coloplast A/S  
Hofveddam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

**Brugervejledning**

23323508 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes.©  
2020-06-10

**Tilsigtet brug**

Brava Klæbefjerner-serviet er beregnet til fjernelse af medicinske klæbere fra intakt hud.

**Advarsler**

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (gen)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

**Forholdsregler**

Undgå direkte brug på ikke-intakt hud, som f.eks. sårbunde og slimhinder (øjne, ører, næse, mund, vagina), da dette kan forårsage hudirritation.

Frarådes til brug hos for tidligt fødte spædbørn, nyfødte eller spædbørn under 4 kg på grund af disses ikke-færdigudviklede hud.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

**Information**

Produktet er silikonebaseret. Produktet tørrer på få sekunder og har ingen indvirkning på efterfølgende produkters klæbeevne.

Ingredienser: Indeholder en blanding af alkylsiloxaner.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

**Anvendelse**

1. Riv pakningen op, tag servietten ud, og fold den ud.

2. Tør resterne af.

**Bortskaffelse**

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

**Indberetning af utilsigtede hændelser**

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

## Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato



Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Producent



Se brugervejledning



Må ikke genbruges  
Indikerer, at stregkoden indeholder Unik Udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Bør ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage