

Hudbeskyttelsesfilm Serviet



Coloplast A/S
Hofveddam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugervejledning

23323896 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes.©
2020-07-02

Tilsligtet brug

Produktet er beregnet til beskyttelse af intakt hud mod de skadelige virkninger fra affaldsprodukter fra kroppen og medicinsk klæber.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (gen)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Forholdsregler

Undgå direkte brug på ikke-intakt hud, som f.eks. sårbundte og slimhinder (øjne, ører, næse, mund, vagina), da dette kan forårsage hudirritation.

Frarådes til brug hos for tidligt fødte spædbørn, nyfødte eller spædbørn under 4 kg på grund af disses ikke-færdigudviklede hud.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Information

Produktet er silikonebaseret. Produktet tørrer på få sekunder og har ingen indvirkning på efterfølgende produkters klæbeevne.

Ingredienser: Indeholder en blanding af alkylsiloxaner.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Anvendelse

1. Sørg for, at huden er ren og tør.
2. Riv pakningen op, tag servietten ud, og fold den ud.
3. Produktet påføres de områder, der skal beskyttes.
4. Når huden er helt tør, sættes klæberen på som normalt.

Det er nødvendigt at anvende produktet, hver gang klæberen skiftes.

Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Producent



Se brugervejledning



Må ikke genbruges



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik Udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Bør ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage