

**Brugervejledning**

Læs følgende anvisninger omhyggeligt.

23328022 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S.

Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-08-05

Tilsigtet formål

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

Indikationer

Produktet er beregnet til personer med stomi.

Advarsler

Genbrug af dette produkt til engangsbrug frarådes, da det kan forårsage krydskontaminering og kan føre til lokal infektion.

Oparbejdning, rensning, desinficering og/eller sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Information

Stomipose til engangsbrug.

Den trykte volumenindikator er kun en indikativ skala til måling af volumen.


Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik strejkode.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.


Særlige opbevaringskrav

Produktet skal opbevares vandret.

Bør ikke udsættes for sollys.

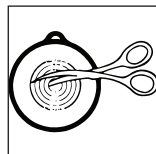
Sådan anvendes**Forberedelse**

Følg klippeguiden på basispladen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.

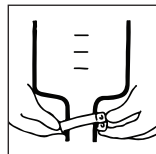


Fold udgangen én gang, før klemmen lukkes.

Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt tør, inden basispladen påsættes.


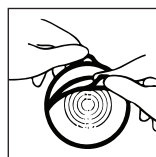
Påsætning

Pil beskyttelsesfilmen af basispladen.

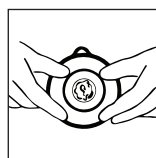

Placer basispladen omkring stomien, og tryk på basispladen for at sikre, at den hurtigt klæber fast, og at der opnås en perfekt pasform mellem den klæbende overflade og huden omkring stomien.

Klæberen skal sidde tæt omkring stomien. For at forhindre lækage er det vigtigt at sikre en tæt vedhæftning omkring stomien, ved at hullet passer perfekt til huden omkring stomien. Når klæberen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at få presset klæberen godt fast til huden. Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien samtidig med, at du presser klæberen godt fast til huden.

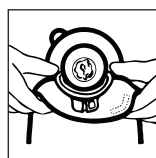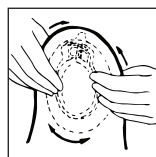

Ved poseskift sørg for, at basispladen er tør og ren (brug kun vand til at rengøre basispladen).

Kontroller at låseringen er åben. Placer den nederste del af posens kobling på den nederste del af basispladens kobling.

Tryk posen og basispladen sammen i bunden med dine langfingre.



Luk låseringen ved at trykke låsen sammen. Posen er låst sikkert fast til basispladen, når der høres et "klik".

Placering

Læg posen ved siden af dig i sengen, eller efter behov.

For at sikre optimal drænage er det vigtigt, at drænageposen til sengekanten er placeret lavere end dig selv, når du ligger i sengen.

Tømning af posen

Åbn udløbet og tøm posen ud i toiletet ved behov.

Rens udløbet, for eksempel med toiletpapir. Fold og luk udløbet igen, når du har tømt posen.

Aftagning

Posen fjernes ved at åbne låseringen ved at trykke med spidsen af en finger på den lille flig, der vender væk fra maven.

Tag fat i aftagningsøret, og fjern posen ved at trække den forsigtigt af basispladen.

Fjern forsigtigt basispladen ved at trække basispladens aftagningsflig væk fra huden, og rul langsomt basispladen nedad.

Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toilettet.

Filterlabel

For at forhindre udslip af tarmluft kan man, om nødvendigt, sætte en af de medfølgende filterlabels på filtret.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugervejledning



Må ikke genbruges



Indikerer en stregkode, som indeholder en unik udstyrsidentifikationskode



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage