

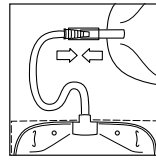


Anvendelse**Forberedelse**


Ved tilslutning til urostomiposen om natten skal natposen kobles til urostomiposen med den fleksible udløbslange som ligger i æsken.

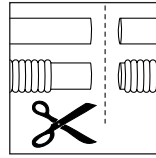


Hvis du klipper en bølgeformet slange, skal du efterlade så meget som muligt af det lige stykke. Dette vil sikre en sikker tilslutning mellem slangen og konnektoren, når konnektoren monteres.

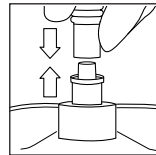

Tilslut slangen til posen ved at trykke den klippede ende af slangen fast ind i posens indløbskonnektor.

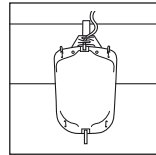


Du kan hænge natposen til sengekanten ved hjælp af en poseholder eller et stativ.

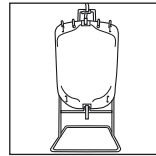

Anbring posen sikkert i holderen eller på stativet ved at føre holderens eller stativets tænder ind i åbningen øverst på posen. Sæt krogen på poseholderen fast på sengekanten, eller placer stativet på gulvet ved siden af sengen.

For at sikre optimal tømning er det vigtigt, at natposen er placeret lavere end dig selv, når du ligger i sengen.

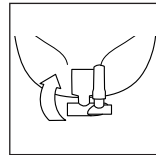


2-trins udløb

Kontroller, at udløbsstudsens er lukket.


Ventilen vender opad, når den er lukket.

Din natpose er nu klar til at blive tilsluttet til din urostomi flerkammerpose.

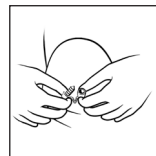
Påsætning

Hold udløbsstudsens på din urostomi flerkammerpose opad, og klem yderenden af udløbet sammen, træk prop-pen ud, og hold på udløbet.

Du kan nu tømme din urostomi flerkammerpose, inden du påsætter natposen til urostomiposen.

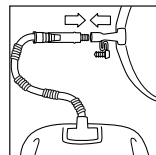

Slange med for-monteret konnektor

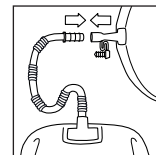

Afkortet slange med monterede konnektorer

Tilslut natposen til urostomi flerkammerposens udløb.

Urinopsamlingssystemet er nu klar til brug.

**Brugsanvisning**

23323952 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-09-07

Erklæret formål

Natposen er beregnet til urinopsamling.

Indikationer

Natposen til urostomi er beregnet til personer, som har brug for en pose med ekstra volumen, f.eks. om natten.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da det kan indebære en potentiel risiko for at skade brugeren.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Information

Posen er usteril og beregnet til engangsbrug.

Produktet kan rumme 2000 ml.

Natposen til urostomi kan bruges sammen med alle Coloplast-urostomi flerkammerposer.


Natposens integrerede konnektor kan tilsluttes sikkert til udløbet på Coloplast-urostomi flerkammerposer.

Den trykte volumenindikator er kun en indikativ skala til måling af volumen.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik stregkode.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Tømning

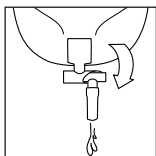

Åbn og tøm posen i to trin.


- 1) Tryk ventilen nedad
- 2) Tryk ventilen til siden for at starte tømning

Vi anbefaler at posen tømmes, når den er lidt over halv fuld for at sikre optimal tømning.

Aftagning

Hvis natposen er tilsluttet til en urostomi flerkammerpose, skal du lukke urostomi flerkammerposens udløbsstuds. Fjern derefter natposen. Undgå at røre ved den åbne ende af urostomi flerkammerposens udløbsstuds.

Bortskaffelse

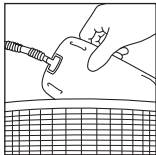

Udskift natposen i henhold til lokale retningslinjer og anbefalinger.

Tøm posen, inden den kasseres.

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug, og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Den må ikke skylles ud i toilettet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Varenummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik udstyrsidentifikation



Global Trade Item Number (GTIN-varenummer)



Må ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage