

2-dels urostomi flerkammerpose

Basisplade til stomi

Stomipleje



Brugervejledning

23326123 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-02-08

Tilsigtet formål

Stomiposen er beregnet til at opsamle afføring fra en stomi. Den klæbende basisplade er fastgjort til stomiposen og er beregnet til at klæbe til intakt hud omkring stomien.

Indikationer

Produktet er beregnet til personer med stomi.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Forholdsregler

Spørg din sundhedsperson om korrekt brug, før du begynder at bruge et Convex-produkt.

Dette sterile produkt indeholder råmaterialer af naturlig oprindelse, og der er risiko for, at materialerne indeholder patogener, som ikke kan fjernes fuldstændigt under selv de mest stringente produktionsprocesser. Derfor indebærer brug af produktet en øget risiko for infektion hos sårbare patientgrupper, og det bør anvendes med forsigtighed hos babyer og spædbørn med uudviklet immunforsvar eller spædbørn, som får immunundertrykkende behandling.

Information

Urostomi flerkammerpose til engangsbrug.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik strejkode.


Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Opbevar basispladen vandret.

Sådan anvendes

Forberedelse

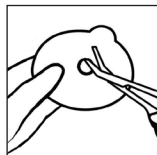

Følg klippeguiden på basispladen og klip et hul, med en buet saks, der passer til stomien i størrelse og form. Du kan bruge den medfølgende stomi-måleguide til at måle stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet passer perfekt til huden omkring stomien.



Rengør huden omkring stomien. Huden skal være helt tør, inden basispladen påsættes.


Påsætning




Placer tommelfingeren på aftagningsøret (på den klæbende del) og træk i det andet øre på beskyttelsesfolien.



Placer basispladen omkring stomien, og tryk på basispladen for at sikre, at den hurtigt klæber fast, og at der opnås en perfekt pasform mellem den klæbende overflade og huden omkring stomien. Klæberen skal sidde tæt omkring stomien. For at forhindre lækage er det vigtigt at sikre en tæt vedhæftning omkring stomien, ved at hullet passer perfekt til huden omkring stomien. Når klæberen er påsat, er det efterfølgende meget vigtigt at få presset klæberen godt fast til huden. Lad fingeren løbe hele vejen rundt om stomien samtidig med, at du presser klæberen godt fast til huden.

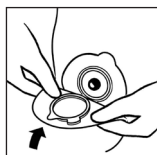

Ved poseskift sørg for, at basispladen er tør og ren (brug kun vand til at rengøre basispladen). Kontroller at låseringen er åben. Placer den nederste del af posens kobling på den nederste del af basispladens kobling.

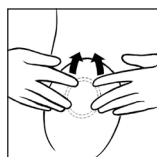

Tryk posen og basispladen sammen i bunden med dine langfinger.



Luk låseringen ved at trykke låsen sammen. Posen er låst sikkert fast til basispladen, når der høres et "klik".



Udløbet kan skjules i lommen foran, så stomiposen er mere komfortabel og diskret.

Tømning/drænage



Hold udløbets prop/ende opad, klem om udløbets yderste del, og træk proppen ud. Vend derefter udløbet nedad, slip grebet om udløbet, og tøm derefter posen. Når posen er tømt, skal proppen skubbes i bund, så udløbet lukkes effektivt.

Aftagning



Fjern posen ved at åbne låseringen og trykke på den lille tap med en fingerspids.



Tag fat i aftagningsøret, og fjern posen ved at trække den forsigtigt af basispladen.




Basispladen aftages langsomt ved at trække i aftagningsøret og fjerne den forsigtigt fra huden. Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toilettet.

Natpose

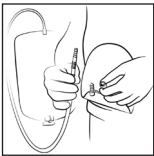

For større sikkerhed anbefaler vi, at du bruger Coloplast drænagepose til sengekanten, der er specielt designet til at blive tilsluttet direkte til din urostomi flerkammerpose. Urostomi flerkammerposer kan tilsluttes til alle typer drænageposer til sengekanten ved brug af den medfølgende konektor.

Konnektorens smalle ende skubbes ind i urostomi flerkammerposens åbning, og den anden ende sluttes til drænageposen til sengekanten.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugervejledning



Må ikke genbruges



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik enhedsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker