

**Advarsel**

Genbrug af dette engangsprodukt indebærer en potentiel risiko for brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og sterilisering kan forringe produktets egen-skaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

**Forsigtig**

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af anvendelse af dette produkt i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Dette produkt er sterilt (gælder 19001, 19010, 19011)  
Må ikke resteriliseres.  
Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget.

**Tilsluttet anvendelse**

Den selvklæbende SenSura basisplade og stomipose er beregnet til opsamling af output fra en stomi.

**Oplysninger**

SenSura/Coloplast Post-Op og SenSura1-dels tømbar med blød udløbsventil kan anvendes som Post-Op pose og som standardpose.

**Sådan anvendes posen**

1

**1. Tilpasning af hulstørrelse**

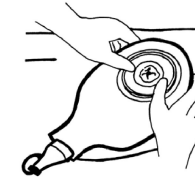
Mål størrelsen og formen af stomien med den vedlagte stomaguide. Aftegn dernæst stomiens størrelse og form med en kuglepen på klippeguiden på klæberens bagsidefolie. Klip klæberen til, så den passer til stomiens størrelse og form. For at undgå lækage og hudproblemer er det meget vigtigt, at hullet i klæberen passer perfekt om stomien. Det er nemmest at klippe med en buet saks. Sæt klæberen på ren og tør hud. Udløbet skal lukkes, før posen sættes på.

2

**2. Beskyttelsesfolien fjernes**

Placer tommelfingeren på det hvide aftagningsøre og træk i den blå afmærkning på beskyttelsesfolien.

3

**3. Påsætning**

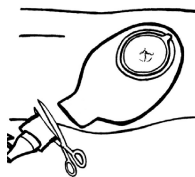
Påsæt klæberen rundt om stomien. For at sikre, at klæberen kommer til at sidde perfekt omkring stomien, bøjes den bagover, mens den presses fast mod huden. Start nedefra og fortsæt opadtil og pres langsomt klæberen på plads med fingrene.

4

**4. Aftagning**

Tag fat i det hvide aftagningsøre på klæberen, og træk forsigtigt posen af huden. Samtidig holdes igen på huden med den anden hånd.

5

**5. Sådan fjernes udløbet (Kun til hospitalsbrug)**

Posen leveres med et udløb, der kan anvendes i forbindelse med en drænagepose. Udløbsstudsens kan også klippes af, og udløbet kan lukkes med en klemme.

6

**6. Håndtering af vindue – kun poser med vindue**

Luk vinduet ved at bøje låget, så det dækker vinduet, og anbring tommelfingeren på låget og de andre fingre under den fleksible flange/ring, hvor vinduet er fastgjort til posen. Lad fingrene glide fra bunden til toppen.

Åbn vinduet ved at sætte fingrene på vinduets flig, mens du holder fast på den fleksible flange/ring med den anden hånd og forsigtigt trækker vinduet bort fra posen.

**Symbol****WO**

Produktionsordre. Produktionsnummer til identificering af en specifik ordres emballage (LOT-nummeret angiver produktionsperioden).