

Fistel og sår bandageringsystem

Fistel drænagepose



Brugsanvisning

23323998 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-07-14

Erklæret formål

Fistel drænageposen er beregnet til passiv opsamling af output fra fistel- og sårsekret ved at være tilsluttet fistel og sår bandageringsystemet. Fistel drænageposen kan også bruges til passiv opsamling af output fra ileostomier med højt flow ved at slutte den til en ileostomipose.

Indikationer

Fistel drænageposen er indiceret til brug som ekstra tømningsskapacitet sammen med fistel og sår bandageringsystemet, der bruges til komplekse fistler og/eller sår i maveområdet. Fistel drænageposen er også indiceret som ekstra tømningsskapacitet sammen med en pose til ileostomi, der bruges til et stoma med højt output fra ileostomi.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Oparbejdning, rensning, desinfektion og/eller (re)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Information

Fistel drænageposen er udviklet til brug sammen med fistel og sår bandageringsystemet.

Fistel drænageposen kan også bruges sammen med: Assura®/Alterna® Magnum-pose, Assura®/Alterna® Post-op-pose, SenSura®/Coloplast® Magnum-pose, SenSura®/Coloplast®-drænagepose og SenSura®/Coloplast® Post-op-pose

Fistel drænageposen er et usterilt produkt til engangsbrug.

Produktet kan rumme 2000 ml.

Den trykte volumenindikator er kun en indikativ skala til måling af volumen.


Produktet er ikke fremstillet af naturlig gummilatex, men en sjælden kontaminering med spor af naturlig gummilatex under fremstillingen eller indpakningen kan finde sted.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkningen på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik strejkode.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Anvendelse

Forberedelse

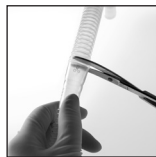

Slangen på posen har flere led. Hvert led kan fungere som en konektor til udløbsventilen.

Mål længden af den påkrævede slange. Hvis slangen er for lang, kan du klippe den ved den passende ledmarkering.

Hvis du klipper en bølgeformet slange, skal du efterlade så meget som muligt af den lige sektion. Dette vil sikre en sikker tilslutning mellem slangen og konnektoren, når konnektoren monteres.

Påsætning



Sæt hele udløbsventilen ind i slangen.

Sørg for, at udløbsventilen er sikkert tilsluttet ved at skubbe den så langt ind i slangen som muligt.

For at sikre optimal tømning er det vigtigt, at fistel drænageposen er placeret lavere end dig selv, når du ligger i sengen.

Vi anbefaler at tømme posen, når den er lidt over halv fuld for at sikre optimal tømning.

Sørg for, at afløbshanen er lukket.

Aftagning

Fjern fistel drænageposen fra fistel og sår bandageringsystemet eller stomiposen.

Lukning af systemet, når det ikke bruges



For at undgå lugtgæner skal du tilslutte slangen til udløbsventilen øverst på posen, så lugten holdes inde i posen.

Bortskaffelse

Udskift posen i henhold til lokale vejledninger og anbefalinger.

Tøm posen, inden den kasseres.

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Produktet må ikke skylles ud i toilettet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Ikke fremstillet af naturlig gummilatex



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik udstyrsidentifikation



Global Trade Item Number (GTIN-varenummer)



Må ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage