

Sådan anvendes Conseal 1-dels prop

Sådan sættes 1-dels proppen i

1. Fjern beskyttelsespapiret fra klæbefladen.



2. Før forsigtigt proppen ind i stomien. Kontroller, at klæbefladen passer rundt om stomien.



3. Tryk klæbefladen fast mod huden, og læg derefter forsigtigt hånden midt på det flade låg i et par sekunder.



Brugervejledning 23314311 Version 1

Coloplasts logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © [2013-03]

Sådan fjernes proppen

4. Løsn klæbefladen i kanten. Fjern derefter klæberen ved langsomt at trække den nedad og bort fra huden. Proppen glider let ud. Fortsæt, indtil hele proppen er fjernet.




Sådan sættes posen på

5. Coloplast lukkede poser fås både forudstanset og til individuel udklipning. Vælg en forudstanset pose, der er lidt større end din stomi, og fjern beskyttelsespapiret fra klæberen. Hvis du vælger en pose til individuel udklipning, skal du klippe sådan, at klæberen er lidt større end din stomi.



Tag beskyttelsespapiret af

6. Anbring klæberen omkring din stomi, og tryk den godt fast på huden.

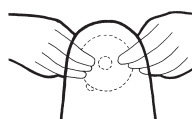

Sådan fjernes posen

7. Løsn klæberen i kanten. Fjern derefter klæberen ved langsomt at trække den nedad og væk fra huden. Fortsæt, indtil hele posen er fjernet.



Tarmtømning/irriterende

Fortsæt med irrigation, hvis du normalt anvender denne procedure.

Indikation

Conseal proppen er indiceret til personer med en kolostomi. Conseal proppen skal indføres i stomien for at blokere for udsivning.

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Forsigtig

Kontakt din læge eller sygeplejerske, før du anvender Conseal proppen. Conseal proppen anbefales ikke til personer, som vejer under 40 kg. Coloplast anbefaler, at hver prop højst anvendes i 12 timer.

Advarsel

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for at skade brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.