

Coloplast®



Pasta

Udfylder fordybninger/folder

Stomipleje



Brugervejledning

23327160 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S.
Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-03-12

Tilsigtet formål

Produktet er beregnet til at udfylde fordybninger/ujævnheder i den intakte hud omkring stomien. Dette danner en tæt tilslutning mellem hud og klæber, og beskytter huden mod output fra stomien

Advarsler

Brava Modellerbar Pasta er ikke et sterilt produkt og må ikke anvendes af personer med stærkt svækket immunsystem eller personer, der er i behandling med immunhæmmende medicin.

Brava Modellerbar Pasta må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn eller spædbørn i kuvøse.

Forholdsregler

Produktet indeholder alkohol og må ikke anvendes direkte på åbne sår eller omkringliggende hud. Når det anvendes ved irriteret eller slidt hud kan du opleve en sviende følelse. Kontakt en sundhedsperson, hvis hudirritation forekommer og ikke forsvinder.

Bør ikke udsættes for sollys.

Produkterne skal opbevares køligt og tørt – må ikke fryses. Vent til produkterne har stuetemperatur, før de anvendes.

Kun til udvortes brug.

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Sådan anvendes


Forberedelse

For at undgå at forurene pastaen


- Tuben må hverken komme i berøring med vand eller stomi.
- Hænderne skal vaskes grundigt og tørres, når pastaen er påført.

Før pastaen påføres, skal det sikres, at huden omkring stomien er ren og tør.


Påsætning

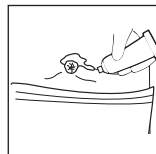

Pastaen kan påføres huden direkte fra tuben for at udjævne dybe hudfolder, ar eller ujævne overflader. Pastaen må ikke påføres hele klæberområdet. Den kan også påføres direkte på klæberen.

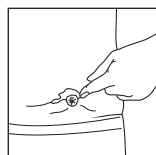

Hvis der er brug for det, udjævnes pastaen ved at glatte den med en spatel eller en fugtig finger.

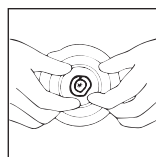

Efter klæberen er sat på, skal det sikres, at den passer perfekt rundt om stomien ved at trykke ovenpå klæberen med fingrene.

Efter brug fjernes pastarester på tuben med en ren serviet. Sæt hættten på tuben igen, og skru den godt fast for at forhindre kontakt med fugt.

Aftagning

Pastaen er let at fjerne med lunkent vand og en vaskeklud. Olierede pastarester kan blive siddende på huden indtil næste påsætning. Det er bedre at efterlade lidt pasta end at risikere at irritere huden ved at skrubbe alle rester af.

Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det må ikke skylles ud i toilettet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugervejledning



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik enhedsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage