

Modellerbar Pasta, stænger

Udfylder fordybninger/folder

Stomipleje



Coloplast A/S
Høfvedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugervejledning

23325814 Version 1

Coloplast-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Coloplast A/S.

Alle rettigheder forbeholdes. © 2021-01-27

Tilsligtet formål

Brava Pasta er beregnet til at udfylde fordybninger/ujævnheder i den intakte hud omkring stomien. Dette danner en tæt tilslutning mellem hud og klæber, og beskytter huden mod output fra stomien.

Advarsler

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for at skade brugeren.

Oparbejdning, rensning, desinficering og/eller sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Forholdsregler

Dette sterile produkt indeholder råvarer af naturlig oprindelse, og der er risiko for, at materialerne indeholder patogener, som ikke kan fjernes fuldstændigt ved selv de strengeste fremstillingsprocesser.

Derfor indebærer brugen af produktet en øget infektionsrisiko for sårbare patientgrupper og bør anvendes med forsigtighed hos for tidligt fødte børn og spædbørn med umodne immunforsvar og spædbørn, der får immunhæmmende behandling.

Kun til udvortes brug.

Produktet skal opbevares vandret.

Bør ikke udsættes for sollys.


Information

Hvis der kun er brug for et mindre stykke Pasta Stang, skæres det nødvendige stykke af stangen. Hvis der er brug for et større stykke, kan to stykker pastastænger trykkes sammen med fingrene.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Sådan anvendes


Forberedelse

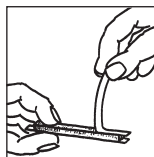

Sørg for, at huden omkring stomien er ren og tør. Tag fat i den turkise tap og træk den tilbage for at åbne.

Tag Pasta stangen ud. Fjern beskyttelsesfilmen, og Pasta Stangen er klar til brug.

Påsætning

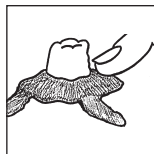

Sæt et stykke Pasta Stang på den ujævne hud. Modeller pastaen ind i huden. Pastaen skal fylde fordybningen/folden helt ud, således at Pasta og hud danner en jævn overflade.

Det kan være en hjælp at fugte fingrene med vand, inden du modellerer Pasta Stangen. Sæt derefter klæberen på.

Aftagning

Pastaen kan til enhver tid tages af huden. Normalt er der ingen rester tilbage på huden, da pastaen fjernes fra huden sammen med klæberen.

Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toiletet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til fabrikanten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Batchkode



Fremstillingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Fabrikant



Se brugsanvisning



Må ikke genbruges



Indikerer en stregkode, som indeholder Unik enhedsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-
varenummer



Må ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



MR-sikker