
Brugsanvisning Iryfix®

Iryfix®-stomiprop er indikeret til patienter med venstresidig kolostomi, som irrigerer, og hvis stomi ikke er større end 35 mm.

Den skal bruges umiddelbart efter irrigation i situationer, hvor det ikke er nødvendigt at opsamle afføring. Den muliggør gasadsorption uden lødgener. Den giver diskretion i et par timer. Ud over denne tidsgrænse anbefales det at bruge en stomipose.

Patientpopulation: Iryfix® skal bruges på voksne.

Særlig bemærkning: Børn, gravide og ammende kvinder: Undersøgelser, der er gennemført i dyremodeller, er utilstrækkelige til at konkludere på toksiciteten af komponenterne i Iryfix® hos børn, gravide eller ammende kvinder. Der foreligger ingen data om brugen af Iryfix® hos disse specifikke populationer. I mangel af data frarådes det at bruge Iryfix® i disse tilfælde.

Klargøring af huden: Vask hænderne. Rengør huden omkring stomien med vand alene. Tør huden forsigtigt. Undgå æter, sprit eller antiseptiske midler, som kan forstyrre den hudbeskyttende klæber.

Sådan påsættes Iryfix®: Fjern det beskyttende papir fra klæberen. Placer Iryfix® i den korrekte position, mens du forsigtigt fører filteret ind i stomien. Stryk klæberen hen over huden og sørg for, at der ikke er nogen rynker. Med et let tryk sikres det, at Iryfix® er fastklæbet korrekt.

Sådan fjernes Iryfix®:

Når Iryfix® skal fjernes, løsnes et hjørne af klæberen og det tages forsigtigt af.

Nationale regler for destruktion af potentielt smittefarlige materialer skal overholdes



Advarsler: Genbrug af anordninger til éngangsbrug udgør en risiko for patienten. Det kan forårsage kontaminering og/eller funktionssvigt. Ophør med at bruge det medicinske udstyr ved sjældne tilfælde af følsomhed eller allergisk reaktion på Iryfix® eller et af dens materialer. Iryfix® passer ikke korrekt, hvis morfologien af stomien ikke er tilpasset, eller hvis diameteren på stomien overstiger 35 mm. I disse tilfælde frarådes det at anvende Iryfix®. Selve irrigationen af kolostomien er kontraindiceret under følgende omstændigheder: Aktuell behandling med kemoterapi, Stråleinducerede skader på tarmen, Irritabel tyktarm, Crohns sygdom, Divertikulitis, Peristomale hernier, Diarré, Ulcerøs inflammation af tyktarmen, Fistel.
