

---

## DA Brugsanvisning

Hvad Ileo Gel+ er, og hvad det bruges til:

B. Braun Ileo Gel+ er et gelmiddel til brug i stomiopsamlingsposer.

### Indikation:

Fortykkelse af vandig afføring i stomiposer, anbefales til enterostomater.

### Kliniske fordele og ydeevner:

Ileo Gel+ omdanner vandig afføring til en gel, der gør den nemmere at håndtere, specielt i forbindelse med tømning af posen. Det reducerer også risikoen for, at filteret blokeres, hvorved dets effektivitet forlænges.

### Sammensætning:

Natriumpolyakrylat-pulver (vandopløseligt brev).

**Patientpopulation:** ileostomater og colostomater med vandig afføring, voksne og børn over fire år.

**Kontraindikation/tilbageværende risiko og bivirkninger:** der er ingen formelle kontraindikationer, tilbageværende risiko eller bivirkninger for brug af Ileo Gel+.

### Brug af produktet:

1. Tør dine hænder omhyggeligt før brug.
2. Tilsæt brevet i posen.

#### ■ For 2-delte systemer:

- Tilsæt brevet gennem posens øverste åbning, inden posen sættes på.
  - Efter tømning af posen kan der tilsættes et nyt brev i posen via posens udløb.
- Undgå at klemme brevet.

#### ■ For 1-delte systemer:

- Tilsæt brevet gennem posens øverste åbning, inden posen sættes på.
- Efter tømning af posen kan der tilsættes et nyt brev i posen via posens udløb.

---

uden at presse på brevet.

3. Når posen er fuld, skal den tømmes gennem udløbet og kun ned i et toilet.

**Vigtigt!**

- Hvis du oplever problemer med at tilsætte brevet, kan du fugte brevet med vand i maks. 3 til 5 sekunder. Brevet vil blive slibrigt, hvilket gør det nemmere at tilsætte.
- Hold ikke det våde brev i hænderne.
- Et brev er normalt nok til at fortykke posens indhold. Dog kan der tilsættes endnu et brev **alt** efter mængden af afføring.
- Tilsæt ikke mere end 2 breve samtidigt – dette kan gøre afføringen for solid og gøre det svært at tømme posen.

**FORHOLDSREGLER FOR BRUG:**

- MÅ IKKE INDTAGES
- TILSÆT BREV(E) I STÅENDE ELLER SIDDENDE STILLING
- UNDGÅ AT LÆGGE DIG NED, FØR DEN FØRSTE AFFØRING ER FORTYKKET
- OPBEVAR UTILGÆNGELIGT FOR BØRN
- INDEHODLER SULFITER
- SKAL BESKYTTES MOD FUGTIGHED
- OVERHOLD OPBEVARINGSTEMPERATUREN TRYKT PÅ ÆSKEN EFTER FJERNELSE AF BESKYTTELSFILMEN
- MÅ IKKE BRUGES EFTER UDLØBSDATOEN

Nationale forordninger vedrørende bortskaffelse af potentielt infektiøse materialer skal overholdes.