

BESKRIVNING

TENA *Lady* är läckagesäkra, bekväma och diskreta skydd för små till medelstora urinläckage. Skydden finns i nio olika absorptionsnivåer och är indelade i tre grupper; trosskydd (Ultra Mini, Ultra Mini Plus), bindor (Mini, Mini Plus, Normal) samt bindor+ (Extra, Extra Plus, Super, Maxi Night). De passar framförallt kvinnor, men även män kan använda de större storlekarna tillsammans med en tätt åtsittande kalsong eller fixeringsbyxa.

Trosskydden samt bindorna TENA *Lady* Mini och Mini Plus har en absorberande kärna med superabsorbenter och ett ytskikt som ger mycket hög absorptionshastighet och bra återvätningsegenskaper.

Bindan TENA *Lady* Normal och samtliga bindor+ har två absorberande kärnor. Urinen absorberas snabbt, sprids och lagras i botten av skyddet, vilket gör att ytan känns torr och risken för läckage minskar. TENA *Lady* Normal, Extra, Extra Plus och Maxi Night är försedda med mjuk skumelastik i sidorna och Super har en mjuk längsgående elastik. Detta skålformar produkterna vilket ökar både läckagesäkerheten och bekvämligheten.

Alla trosskydd samt TENA *Lady* Mini, Mini Plus, Extra Plus och Maxi Night har Fresh Odour Control™ som hämmar bakterietillväxt och reducerar uppkomst av oönskad lukt. Övriga TENA *Lady* har Odour Control™, som förebygger och reducerar uppkomst av oönskad lukt. Samtliga TENA *Lady* har ett lågt pH-värde under 5,0.

Hela TENA *Lady*-sortimentet är andningsbart med produkter som ventilerar värme och fukt och bibehåller en god hudmiljö. Trosskydden har en andningsbar baksida och övriga TENA *Lady* har ett textilt andningsbart spärrskikt.

Samtliga TENA *Lady*-skydd är kroppsformade med bra passform. De är bekväma, tunna och vita vilket gör dem diskreta för användaren. TENA *Lady* Mini, Mini Plus och Maxi Night ligger i praktiska och diskreta enstycksförpackningar.


Skydden fixeras enkelt i tätt sittande underbyxa/kalsong och sitter säkert på plats med en bred längsgående tejprens på produkternas baksida. Samtliga TENA *Lady* har skyddspapper märkt med produktnamnsvariant/storlek, vilket gör det enkelt att särskilja produkterna.

NYHETER!

TENA *Lady* Maxi Night är en helt ny unik produkt speciellt designad för bästa läckagesäkerhet vid liggande ställning. Skyddet är bredare baktill, vilket ökar säkerheten och bekvämligheten då man ligger ner. Produkten är framtagen för att ge bättre förutsättningar för god nattsömn.

Under 2011 har TENA *Lady* uppgraderats med ett nytt silkeslent ytskikt, Silky Softness, vilket gör skyddet mjukare och bekvämare att bära. Uppgraderingen gäller: TENA *Lady* Ultra Mini, Ultra Mini Plus, Mini, Mini Plus, Extra Plus och Maxi Night.

Under 2011 har TENA *Lady* Mini, Mini Plus och Extra Plus fått en ny mer feminin design med ett tryckt blommönster.

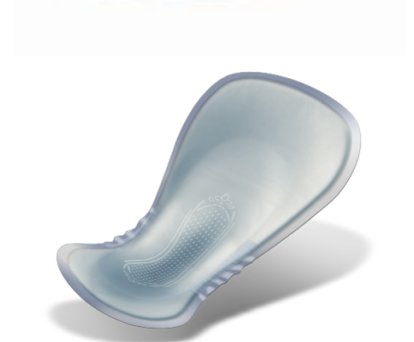

TENA Lady

TENA Lady															
Uppsugningsnivå/ storlek	Midja/höft <i>Not</i> (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Vikt (g)	Ljumske (cm)	Lår (cm)	Stuss (cm)	Antal/ påse (st)	Antal/ kart. (st)	Antal/ kart. (halvpall)	Antal/ kart. (helpall)	Pall- höjd mm	Latex fri	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Art.nr
Mini Magic	-	-	-	-	-	-	-	34	204	105	-	1146	Ja	57	76 10 01
Ultra Mini	-	19	7,2	5,3	-	-	-	28	280	50	-	1160	Ja	97	76 11 20
Ultra Mini Plus	-	21,1	8,1	6,4	-	-	-	24	144	76	-	1030	Ja	126	76 18 01
Mini	-	22	9,6	8	-	-	-	20	200	70	-	1263	Ja	183	76 02 10
Mini Plus	-	25,5	9,8	12	-	-	-	16	160	54	-	1260	Ja	231	76 03 51
Normal	-	27,5	10,6	15,6	-	-	-	30	360	18	-	1248	Ja	306	76 14 80
Extra	-	34	12,1	25,1	-	-	-	30	240	20	-	1300	Ja	531	76 15 80
Extra Plus	-	38	13	35,5	-	-	-	24	192	16	-	1200	Ja	706	76 16 51
Super	-	43	20,1	43	-	-	-	30	180	16	-	1318	Ja	922	76 17 15
Super plastad	-	43	20,1	43	-	-	-	30	180	16	-	1318	Ja	922	76 17 03
Maxi Night	-	38	15	41,5	-	-	-	6	48	44	-	1250	Ja	928	76 09 13

UTFORMNING

YTSKIKT

Material: Non-woven.
Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden.

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester.
TENA *Lady* Ultra Mini samt Ultra Mini Plus: Airlaid bestående av cellulosamassa; CP och tunna fibrer av polypropylen/polyeten.
Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan känns torr.

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa; CP inkl. SAP.
Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin.

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat – med lågt pH under 5,0.
Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår.

ELASTIK

Material: Polyuretan
Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålförm

SPÄRRSKIKT

Material: Polyetenfilm.
TENA *Lady* Ultra Mini och Ultra Mini Plus har en andningsbar baksida bestående av polyetenfilm (PE).
TENA *Lady* Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Extra Plus och Maxi Night har en textilliknande andningsbar baksida bestående av polyetenfilm (PE) och polypropylen (PP) nonwoven.
Funktion: Hindra genomvätning.

Samtliga TENA *Lady* skydd är latexfria.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Trosskydden TENA *Lady* Ultra Mini och Ultra Mini Plus är de minsta skydden i TENA *Lady* serien och anpassade för kvinnor med mycket små läckage, s k droppinkontinens.

Bindorna TENA *Lady* Mini, Mini Plus och Normal är anpassade för mindre till måttliga urinläckage.

Bindor+ TENA *Lady* Extra, Extra Plus, Maxi Night och Super är de mest absorberande skydden i TENA *Lady* serien och passar för måttliga till medelstora urinläckage. TENA *Lady* Maxi Night är speciellt anpassad för bästa säkerhet och bekvämlighet vid liggande ställning.

De minsta skydden passar framförallt kvinnor, men även män kan använda de större storlekarna tillsammans med en tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa.