

## Urinposeholder til læg 104

CE

### Produktbeskrivelse

Urinposeholder er fremstillet i en elastisk Øko-TEX tekstil (95% bomuld og 5% Lycra). **CAD** urinposeholder bæres på enten højre eller venstre underben (læg) og giver brugeren en komfortabel hjælpebeklædning til at fæstne kateterposen i uden at stramme. Findes i 7 størrelser (se nedenstående størrelsesangivelse). Benposen kan vaskes ved 90°C.

### Brugsanvisning

Placer urinposeholderen på underbenet. Sørg for at den brede støtteelastik øverst på poseholderen er placeret lige over knæledet, så knæet fortsat har en fri bøjefunktion i kraft af slidsen mellem støtteelastikken og selve poseholderen. Herefter placeres kateterposen i "lommen" på urinposeholderen. Sørg for at aftapningsstudsens føres ud igennem studsåbningen på urinposeholderen, så der er let adgang til efterfølgende at tømme kateterposen for væske.

Når urinposeholderen skal skiftes ud med en ren skal kateterposen blot tages ud af "lommen" først og der kan skiftes til en ny urinposeholder.

Art.nr.	Størrelsesangivelse
104XS	<b>CAD</b> urinposeholder extra small *omkreds på læg: minimum 28 cm, maximum 38 cm *omkreds på ankel: minimum 20 cm, maximum 32 cm
104S	<b>CAD</b> urinposeholder small *omkreds på læg: minimum 30 cm, maximum 40 cm *omkreds på ankel: minimum 22 cm, maximum 34 cm
104M	<b>CAD</b> urinposeholder medium *omkreds på læg: minimum 34 cm, maximum 42 cm *omkreds på ankel: minimum 24 cm, maximum 36 cm
104L	<b>CAD</b> urinposeholder large *omkreds på læg: minimum 36 cm, maximum 44 cm *omkreds på ankel: minimum 26 cm, maximum 38 cm
104XL	<b>CAD</b> urinposeholder extra large *omkreds på læg: minimum 40 cm, maximum 50 cm *omkreds på ankel: minimum 28 cm, maximum 42 cm
104XXL	<b>Care</b> urinposeholder XXL Omkreds på læg: minimum 44 cm, maximum 54 cm Omkreds på ankel: minimum 30 cm, maximum 46 cm
104XXXL	<b>Care</b> urinposeholder XXXL Omkreds på læg: minimum 48 cm, maximum 58 cm Omkreds på ankel: minimum 32 cm, maximum 48 cm