


carefix[®]
Creating functional comfort



CAREBAG

Urinposefiksering m/lomme til urinpose

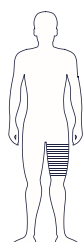

TYTEX[®]

CareBag anvendes til fiksering af urinposer. Den er designet, så den holder posen sikkert på plads og samtidig fordeles trykket fra posen ligeligt rundt om benet.

Produktegenskaber:

- Holder posen sikkert på plads og sikrer derved optimal støtte
- Fordeler trykket fra posen ligeligt rundt om benet
- Reducerer støj fra posen
- Afhjælper risikoen for tryksår
- Ekstra sikkerhed ved fysisk aktivitet
- Nem at anvende
- Meget elastisk, blødt og åndbart materiale
- Passer til både højre og venstre ben
- Med slids i bunden til urinposer med bundaftapning
- Kan holde op til 750 ml
- Praktisk farvekode angiver størrelsen
- Tåler vask ved 60°C
- Latex-frit materiale uden gene for patient og fagpersonale
- Testet for skadelige stoffer iht. Oeko-Tex standard 100

Anvendelse:

CareBag anvendes til fiksering af urinposer. Den er strikket i tubefacon med indbygget lomme, der holder urinposen på plads og med slidt i bunden, der passer til en pose med bundaftapning.

Kvalitet:

80% polyester, 20% elastan

Vaskeinstruktioner:



60°C/140°F

Anbefalede størrelser:

STØRRELSESKEMA	S	M	L	XL
BENETS OMKREDS	30 - 45 cm	45 - 65 cm	55 - 80 cm	65 - 90 cm

Farvekode på produktet angiver størrelsen.

Pakning:



5 stk. per pose

Brugsvejledning:



Træk fikseringen på benet (med farvemærkning øverst).



Placer urinposen i lommen og træk urinposens ventil gennem hullet forneden.



CareBag er på plads.

For yderligere information:

Forhandler: