

carefix[®]

Creating functional comfort



LeggyFix

Urinposefiksering



LeggyFix anvendes til fiksering af urinposer. Den er designet, så den holder posen sikkert på plads og samtidig fordeles trykket fra posen ligeligt rundt om benet.

Egenskaber:

- Holder posen sikkert på plads og sikrer derved optimal støtte
- Fordeler trykket fra posen ligeligt rundt om benet
- Reducerer støj fra posen
- Afhjælper risikoen for tryksår
- Ekstra sikkerhed ved fysisk aktivitet
- Nem at anvende
- Meget elastisk, blødt og åndbart materiale
- Passer til både højre og venstre ben
- Med slids i bunden til urinposer med bundaftapning
- Kan holde op til 750 ml
- Praktisk farvekode angiver størrelsen
- Tåler vask ved 60°C
- Latex-frit materiale uden gene for patient og fagpersonale
- Testet for skadelige stoffer iht. Oeko-Tex standard 100

Anvendelse:

LeggyFix anvendes til fiksering af urinposer. Den er strikket i tubefacon og skal ombukkes, så den derved danner en lomme urinposen. Når LeggyFix er ombukket ses slidsen i bunden, der passer til ventilen i urinposer med bundaftapning.

Kvalitet:

63% polyester, 37% elastan

Vaskeinstruktioner:



60°C/140°F

Anbefalede størrelser:

| STØRRELSESSKEMA | XS | S | M | L | XL |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BENETS OMKREDS | 25 - 33 cm | 33 - 40 cm | 40 - 50 cm | 50 - 60 cm | 60 - 70 cm |

Farvekode på produktet angiver størrelsen.

Pakning:




10 stk. per pose

| OneMed Varenr. | Leggyfix Størrelse |
|----------------|--------------------|
| 201541 | Leggyfix XS |
| 201540 | Leggyfix S |
| 201542 | Leggyfix M |
| 201543 | Leggyfix L |
| 201544 | Leggyfix XL |


Brugsvejledning:




1 Træk fikseringen på benet med farvekoden opad.

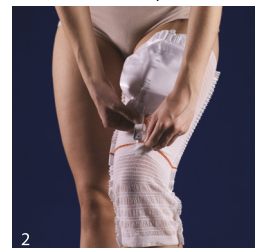

2 Træk urinposens ventil gennem hullet i den røde linje.

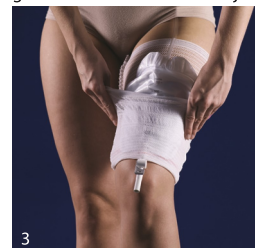

3 Træk den nedre ende af fikseringen op over urinposen.

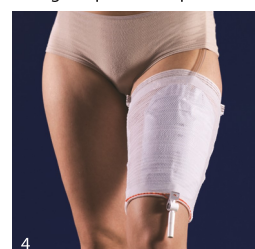

4 LeggyFix er på plads.

For yderligere information:

Forhandler:

ONEMED

P.O. Pedersens Vej 16
8200 Aarhus N.
Tlf. 86 109 109
Email: info.dk@onemed.com