



Forberedelse

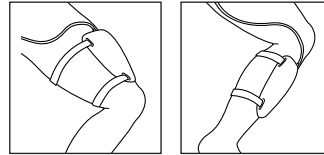


Benposen har en indløbsslange, som ved levering enten kan være fastgjort på posen eller være adskilt fra posen. Længden på slangen bestemmer, hvor på benet posen kan anbringes.

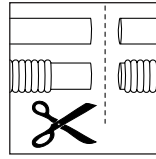


Hvis slangen ikke har en formonteret indløbskonnektor, kan du forkorte slangen til din ønskede længde. Klip ganske enkelt slangen med en saks.

Ved afkortning af en rillet slange skal der efterlades så meget af det glatte afsnit som muligt. Herved opnås en sikker forbindelse mellem slangen og konnektoren, når konnektoren monteres.

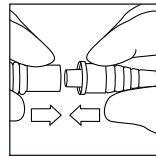


Sæt konnektoren på slangen ved at skubbe den tynde ende af konnektoren så langt ind i slangen som muligt.

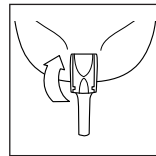

Kontroller, at udløbsstudsens er lukket.

Udløbsstuds

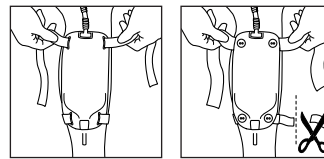

Fastgør fikseringsbåndene på posen. Anbring posen på benet. Fikseringsbåndene kan eventuelt klippes til, hvis de er for lange.



Brugervejledning

23323037 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-03-16

Tilsluttet brug

Urinposen er beregnet til passiv urinopsamling.

Indikationer

Urinposer er beregnet til patienter, som lider af urininkontinens og/eller retention uanset ætiologi.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (gen)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Denne benpose er beregnet til brug for personer, der er oppe af sengen og i bevægelse. Skift til drænagepose til sengekanten med højere kapacitet ved ophold i sengen og under søvn. Som alternativ kan du lade benposen sidde og tilslutte en drænagepose til sengekanten for at udvide kapaciteten af det overordnede urinopsamlingsystem.

Information

Posen er steril og beregnet til engangsbrug.

Produktet er designet til en kapacitet på 350 ml, 500 ml, 750 ml og 1000 ml.

Fikseringsbåndene kan vaskes ved en temperatur på 40 °C/104 °F eller derunder.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkatene på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik strejkode.


Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplast aktuelle anbefalinger.

Maksimalt antal gange produktet kan genbruges

Fikseringsbåndene skal udskiftes, når elasticiteten svækkes.


Anvendelse

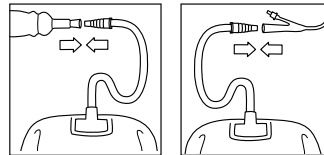

Hvis konnektoren har en beskyttelseshætte, skal den tages af.

Sæt konnektoren fast på uridomet eller katetret.

Urinopsamlingsystemet kan nu tages i brug.

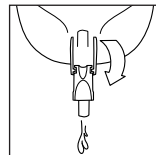


Vi anbefaler, at posen tømmes, når den er lidt over halvt fyldt, for at sikre en optimal drænage.

Aftagning

Kobl posen fra uridomet eller katetret.

Løsn fikseringsbåndene, og fjern posen fra benet.

Bortskaffelse

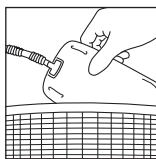

Følg de lokale retningslinjer og anbefalinger ved udskiftning af posen.

Fikseringsbåndene kan genbruges.

Tøm posen, før den kasseres.

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Den må ikke skylles ud i toiletet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD




Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Producent

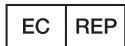

Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab/
Europæiske Union



Se brugervejledning



Må ikke genbruges



Usteril



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik
Udstyrsidentifikation



Global Trade Item Number



Bør ikke udsættes for sollys



Denne side opad



Genanvendelig emballage



Angiver, at produktet kan vaskes ved 40 °C/104 °F