



Brugervejledning

23323151 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020-04-14

Tilsluttet brug

Urinposen er beregnet til passiv urinopsamling.

Indikationer

Urinposer er beregnet til patienter, som lider af urininkontinens og/eller retention uanset ætiologi.

Advarsler

Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (gen)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Information

Posen er beregnet til engangsbrug.

Posen er designet med en volumenkapacitet på 2.000 ml.

Den trykte volumenindikator er kun en indikativ skala til måling af volumen.

Produkterne er beregnet til opbevaring i æsken indtil brug, da æsken beskytter produkterne. Mærkatene på æsken angiver vigtige oplysninger som f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik strejkode.


Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplast aktuelle anbefalinger.

Maksimalt antal gange produktet kan genbruges

Det maksimale antal gange, en poseholder kan genbruges, er én brug pr. dag i 5 år.

Anvendelse

Forberedelse


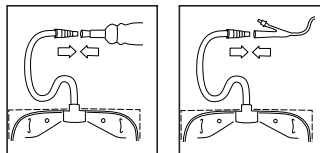


En sengepose kan sluttes direkte til et uridom eller et permanent kateter.

Eller den kan sluttes til en benpose hvis der er behov for ekstra volumen om natten.


Intermitterende kateterisation

En sengepose kan også sluttes til et intermitterende kateter til opsamling af urin under kateterisationen.

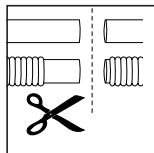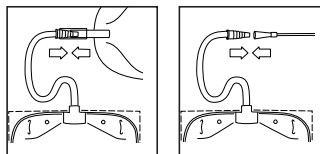


Hvis der ikke er fastgjort en indløbskonnektor på slangen på forhånd, eller hvis selve slangen ikke er fastgjort på posen, kan slangen afkortes til den ønskede længde. Dette gøres ved at klippe slangen over med en saks.

Hvis du klipper en bølgeformet slange, skal du efterlade så meget som muligt af den lige sektion. Dette vil sikre en sikker tilslutning mellem slangen og konnektoren, når konnektoren monteres.

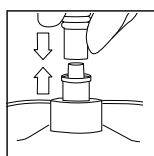


Tilslut slangen til posen ved at trykke den klippede ende af slangen fast ind i posens indløbskonnektor.

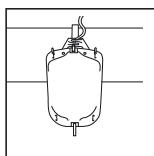

Hæng drænageposen til sengekanten op på en Conveen-poseholder eller et stativ.


Fastgør posen forsvarligt til ophænget eller stativet ved at sætte ophængets eller stativets tænder ind i slidserne øverst på posen. Hæng poseophænget over sengerammen, eller placer stativet på gulvet ved siden af sengen.

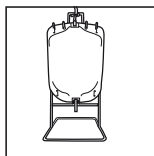

For at sikre optimal drænage er det vigtigt, at sengeposen er anbragt lavere end dig selv, når du ligger i sengen.


Intermitterende kateterisation

Hæng eller anbring posen, som det passer dig bedst, idet du sørger for, at posen er anbragt lavere end dit bækkenområde, hvad enten du foretrækker at kateterisere siddende, stående eller liggende.

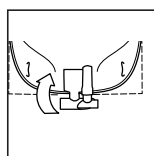

Kontroller, at udløbsstudsens er lukket.

Anvendelse

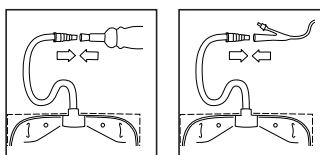


Hvis konnektoren har en beskyttelseshætte, skal den tages af.

Sæt konnektoren fast på uridomet eller det permanente kateter.


Eller sæt konnektoren på benposens udløbsslange. Åbn benposens udløbsstuds.

Urinopsamlingsystemet kan nu tages i brug.

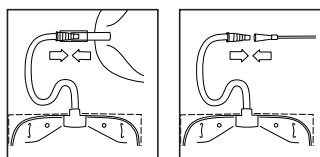

Intermitterende kateterisation
Sæt konnektoren på det intermitterende kateter.

Når du begynder at kateterisere, vil urinen løbe ud i sengeposen.

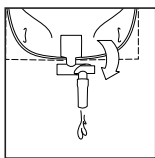

Vi anbefaler, at posen tømmes, når den er lidt over halvt fyldt for at sikre optimal drænage.

Intermitterende kateterisation

Tøm sengeposen efter hver intermitterende kateterisation.

Aftagning

Kobl sengeposen fra uridomet eller det permanente kateter.


Eller, hvis sengeposen er koblet til benposen, luk da benposens udløbsstuds. Frakobl dernæst sengeposen. Undgå at berøre den åbne ende af benposens udløbsslange.

Intermitterende kateterisation

Efter endt kateterisation kobles sengeposen fra det intermitterende kateter.

Tag posen af ophænget eller stativet.

Bortskaffelse

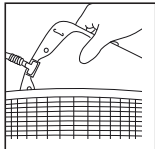

Udskift posen i henhold til lokale vejledninger og anbefalinger.

Poseholderen eller stativet kan bruges igen.

Tøm posen, inden den kasseres.

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Den må ikke skylles ud i toilettet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Producent



Se brugervejledning



Må ikke genbruges



Usteril



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik Udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-varenummer



Bør ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage