

Conveen®

Urinpose

Conveen Contour



Coloplast

 Coloplast A/S
Holtevej 1
3050 Humlebaek
Denmark
Ikke steril

 Coloplast A/S
Holtevej 1
3050 Humlebaek
Denmark
Steril

Brugervejledning

23314014 Version 1

Coloplasts logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © [2013-06]

Indikation

Urinpose

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Forsigtig

Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget.

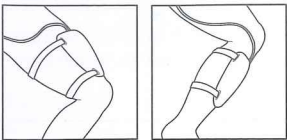
Advarsel

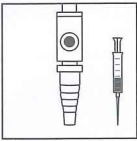
Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for at skade brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Dette produkt indeholder phthalater og må hverken anvendes af børn, gravide eller ammende kvinder, uden at en læge eller sygeplejerske spørges til råds.

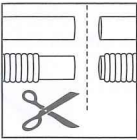
Sådan anvendes en Coloplast benpose med en Conveen Fikseringsbånd

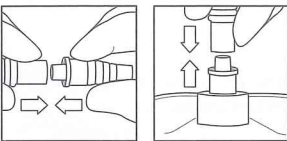
Forberedelse

- 

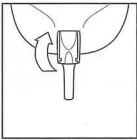
1. Benposen har en indløbsslange, som ved levering enten kan være fastgjort på posen eller være adskilt fra posen. Længden på slangen bestemmer, hvor på benet posen kan anbringes.
- 

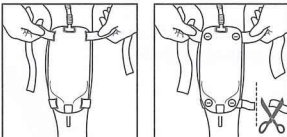
2. Hvis posen er udstyret med en prøveudtagningsport, kan der tages en urinprøve efter behov.

Brug en sprøjte med kanyle.
- 

3. Hvis der ikke er fastgjort en indløbskonnektor på slangen på forhånd, eller hvis selve slangen ikke er fastgjort på posen, kan slangen afkortes til den ønskede længde. Dette gøres ved at klippe slangen over med en saks.
- 

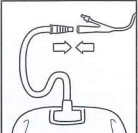
4. Sæt konnektoren på slangen ved at skubbe den tynde ende af konnektoren så langt ind i slangen som muligt.

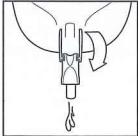
Fastgør slangen til posen ved at skubbe den afklippede ende af slangen ind i posens indløb med et fast tag.
- 

5. Kontroller, at udløbsstudsens er lukket.
- 

6. Fastgør fikseringsbåndene på posen. Anbring posen på benet. Fikseringsbåndene kan eventuelt klippes til, hvis de er for lange.

Anvendelse

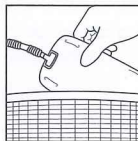
7. Hvis konnektoren har en beskyttelsehætte, skal den tages af.
- 
- 
- Sæt konnektoren fast på uridomet eller katetret. Urinopsamlingsystemet kan nu tages i brug.

8. Vi anbefaler, at posen tømmes, når den er lidt over halvt fyldt, for at sikre en optimal drænage.
- 
- Udløbsstuds

Aftagning

9. Kobl posen fra uridomet eller katetret.
- Løsn fikseringsbåndene, og fjern posen fra benet.

Bortskaffelse

10. Følg de lokale retningslinjer og anbefalinger ved udskiftning af posen.
- 
- Fikseringsbåndene kan genbruges.
- Tøm posen, før den kasseres.
- Posen er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Den må ikke skylles ud i toilettet.

Symboler



DEHP

Indhold eller tilstedeværelse af phthalat: di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)



Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget.