

BESKRIVNING

TENA *Men* är ett inkontinensskydd för män. Skyddet finns i tre absorptionsnivåer anpassade för droppinkontinens samt små och medelstora urinläckage. Det är ett läckagesäkert, bekvämt och diskret skydd.


TENA *Men* Nivå 1 och 2 har en absorberande kärna med superabsorbenter och TENA *Men* Nivå 3 har dubbla kärnor för maximal absorption. Urinen absorberas snabbt, sprids och lagras i botten av skyddet, vilket ger en hög yttorrhet. Baksidesmaterialet förhindrar genomvätning och de mjuka långsgående elastiktrådarna bildar barriärer som ökar läckagesäkerheten. TENA *Men* Nivå 3 är försedd med mjuk skumelastik i sidorna som ökar både läckagesäkerheten, kupformningen och bekvämligheten.

TENA *Men* har Odour Control™ som förbygger och reducerar uppkomst av oönskad lukt genom ett lågt pH-värde under 5,0. Skyddet har en textilliknande andningsbar baksida som ventilerar värme och fukt och bibehåller en god hudmiljö. Produkten har en maskulin design och en anatomisk passform som ökar bekvämligheten. Produkten är diskret, tunn och mjuk och förpackad i diskreta enstycksförpackningar.

TENA *Men* fixeras bäst i en tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa. Skyddet sitter säkert på plats med hjälp av långsgående tejp på produktens baksida.

Förbättringar under 2010

- * TENA *Men* Nivå 3 lanserades för medelstora urinläckage. Nivå 3 har liksom Nivå 1 och 2 ett textilt andningsbart spärrskikt.
- * TENA *Men* Nivå 1 och 2 försågs med ett textilt andningsbart spärrskikt som ventilerar värme och fukt och bibehåller en god hudstatus.
- * TENA *Men* Nivå 1 gjordes något mindre, tunnare och diskretare. Skyddet blev mer stabilt samt kupformningen och passformen förbättrades. En ny vikning av skyddet förenklade också fixeringen.

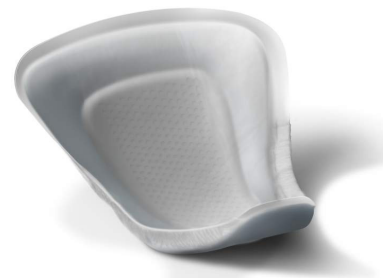

Tena Men															
Uppsugningsnivå/ storlek	Midja/höft <i>Not</i> (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Vikt (g)	Ljumske (cm)	Lår (cm)	Stuss (cm)	Antal/ påse (st)	Antal/ kart. (st)	Antal/ kart. (halvpall)	Antal/ kart. (helpall)	Pall- höjd mm	Latex fri	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Art.nr
Nivå 1	-	23	19,8	12	-	-	-	24	144	60	-	1330	Ja	289	75 06 54
Nivå 2	-	27	23,3	20,6	-	-	-	20	120	40	-	1330	Ja	453	75 07 53
Nivå 3	-	27	22,8	31,7	-	-	-	16	96	30	-	1221	Ja	735	75 08 33

UTFORMNING**YTSKIKT INSIDAN**

Material: Non-woven; Polypropylen (PP)
Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT BAKSIDA

Material: Textilliknande andningsbar baksida: Polyetenfilm (PE) och polypropylen (PP) nonwoven
Funktion: Hindra genomvätning, ökad bekvämlighet och diskretion

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Nivå 3: Vadd av polypropylen och polyester
Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan känns torr

ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa; CP + SAP
Funktion: Absorbera och magasinera urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat – med lågt pH under 5,0
Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

BARRIÄRELASTIK

Material: Nivå 1 och 2: Syntetiskt gummi; Polyisopren (4 elastiktrådar)
Nivå 3: Skumelastik; Polyuretan
Funktion: Förhindrar läckage, ge bra kupform och passform, samt god komfort.

TENA Men är latexfri.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TENA Men finns i tre olika absorptionskapaciteter; Nivå 1, 2 och 3.
TENA Men Nivå 1 och 2 är för män med droppinkontinens eller mindre urinläckage.
TENA Men Nivå 3 är för män med mindre till medelstora urinläckage.

Observera att även TENA Men Protective Underwear Nivå 4 ingår i det totala sortimentet med produkter speciellt utvecklade för män.

