



## Uridom / klæbestrip



Coloplast A/S  
3050 Denmark  
23312362 v.6A Coloplasts logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. © [2012-03] Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

**Advarsel**

Dette produkt indeholder naturgummi (latex), som kan fremkalde allergiske reaktioner hos personer, som er overfølsomme over for latex.

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

**Forsigtig**

Coloplast påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der måtte opstå som følge af anvendelse af produkt i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

**Indikation**


Uridom.

**Sådan anvendes Conveen Uridom / klæbestrip**

- Klip eventuelt kønsbehåringen.
- Vask og tør penisområdet.



1. Pakningen åbnes ved at rive fra den ene ende til den anden.

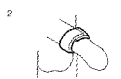

2. Fjern dækpapiret på begge sider af klæbestrippen. Stræk klæbestrippen forsigtigt for at aktivere dens elasticitet. Placer den ene ende af klæbestrippen på penis oven for glans. Træk forsigtigt i klæbestrippen, og svøb den om penis.



3. Rul uridomet op langs penis og over klæbestrippen.



4. Klem forsigtigt uridomet sammen om skafet af penis for at sikre, at klæbestrippen klæber. Ekstra fiksering er ikke nødvendig.



5. Tilslut uridomet til en Conveen urinpose.



6. Uridom og klæbestrip kan blive siddende i 24 timer. Må ikke genanvendes. Sådan fjernes uridomet: Rul uridomet af klæbestrippen følger med.