

# Qufora Uridom

## Skånsom. Fleksibel. Sikker

Qufora Uridom er et gennemsigtigt silikone uridom til mænd i alle aldre, der har brug for hjælp, til at løse et inkontinens problem.

### Specielle egenskaber

#### Skånsom

Den afbalancerede klæber er skånsom mod huden, samtidig med at den sikrer en god vedhæftning til huden og dermed hindrer lækage.

Silikone materialet er "åndbart" og tillader at fugten fra huden slipper igennem. Dette sikrer et tørt og behageligt miljø på hudens overflade.

#### Fleksibel

Silikone er et meget fleksibelt materiale, der giver en perfekt tilpasning til huden i alle situationer.

#### Sikker

Kombinationen af et gennemsigtigt, fleksibelt materiale og en skånsom klæber sikrer den bedst mulige komfort og sikkerhed mod lækage.

#### Qufora uridom måleguide

Brug den medfølgende Qufora uridom måleguide til at bestemme din individuelle størrelse for at sikre den bedst mulige tilpasning.

Hvis der bruges et for stort uridom kan det medføre lækage. Hvis det valgte uridom er for lille kan det beskadige vævet.


#### Sortiment

Qufora Uridomer fås i følgende fem størrelser: **Ø 24, 28, 31, 35 og 40 mm.**

Qufora Uridomer fås i to længder: Standard (80 cm) og Short (47 cm).

Hvis din individuelle størrelse ikke er vist i guiden skal du vælge den nærmeste mindre størrelse.



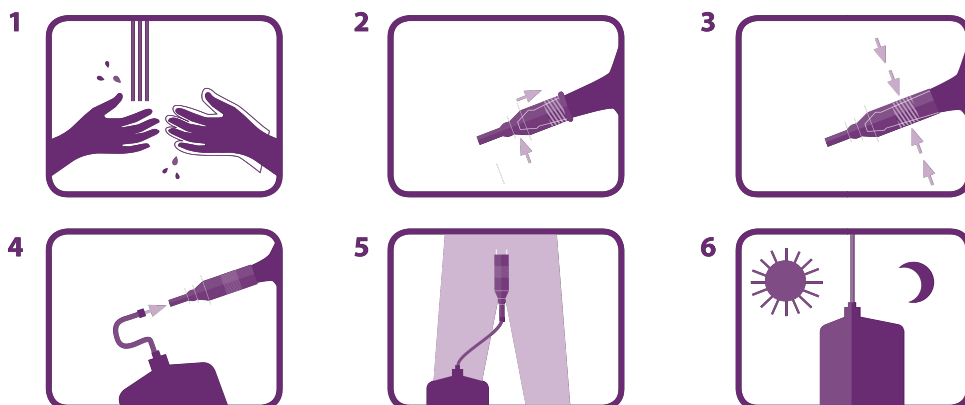

#### Vær opmærksom

Hvis nogen af nedenstående symptomer opstår, fjern straks uridomet og kontakt din læge.

- Penis bliver rød, lilla eller på anden måde får en unormal karakter.
- Hvis der ikke løber urin fra uridomet indenfor 6 timer.
- Hvis der opstår smerter eller svien i urinrøret, blæren eller maveregionen.
- Hvis der opstår kulderystninger eller feber.

**Qufora uridomer må ikke anvendes mere end 24 timer uden at blive skiftet.**

#### Ansvar

MBH-International A/S tager ikke ansvar for personskade eller andre tab der opstår hvis produktet bruges i modstrid med MBH-International A/S' s anbefalinger.

#### Håndtering og opbevaring

Qufora uridom bør opbevares i temperaturer mellem 0 og 25 °C.

Beskyt mod direkte sollys og høje trykbelasninger.

**Produkterne bør opbevares utilgængeligt for børn.**



#### Instruktion

- 1 Vask og tør penis. Vask hænderne.
- 2 Placer uridomet på penis. Efterlad et mellemrum mellem spidsen af penis, og den smalle del af uridomet, rul forsigtigt alle sider af uridomet på penis.
- 3 For at sikre en god kontakt mod huden, klem forsigtigt om den klæbende del af det udrullede uridom.
- 4 Forbind uridomet med en urinpose.
- 5 Fastgør posen på benet og vær sikker på at slangen ikke bøjes eller vinkles så gennemstrømningen af urinen hindres.
- 6 Anvend en mindre, mere bekvem pose i løbet af dagen og en sengepose med større kapacitet om natten.

## Produktsortiment MEC

MBH		Qufora Uridom MEC			
REF	OneMed varenr.	Varebetegnelse	Ø		TYPE
20111101	202090	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 24 mm		Standard - 80 mm
20111201	202091	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 28 mm		Standard - 80 mm
20111301	202092	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 31 mm		Standard - 80 mm
20111401	202093	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 35 mm		Standard - 80 mm
20111501	202094	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 40 mm		Standard - 80 mm
20111103	202095	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 24 mm		Kort - 47 mm
20111203	202096	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 28 mm		Kort - 47 mm
20111303	202097	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 31 mm		Kort - 47 mm
20111403	202098	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 35 mm		Kort - 47 mm
20111503	202099	Qufora selvklæbende uridom, silicone	Ø 40 mm		Kort - 47 mm

**Producent**  
MBH-International A/S  
Tel +45 88 300 592  
www.mbh-international.com

**ONEMED**  
**Distributør**  
OneMed A/S  
Tel: 86 109 109  
www.onemed.dk

For mere information  
besøg [www.mbh-international.com](http://www.mbh-international.com),  
email [info@mbh-international](mailto:info@mbh-international)  
eller ring (+45) 8830 0592

