

Brugervejledning

23314457 Version 1

Coloplasts logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © [2013-03]

Indikation

Peristeen Analprop er beregnet som barriere for afføring i endetarmen.

Kontraindikation

Du må ikke bruge Peristeen analproppen, hvis du lider af:

- Hæmorider (grad 3 og 4)
- Analstenose

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Det tager lidt tid at vænne sig til analproppen, hvis man har normal følelse i endetarmsområdet. Det gælder ikke altid for patienter med nedsat følelse i området.

Afføringen skal være fast og formet.

Analproppen fås i to størrelser. Det kan ikke afgøres på forhånd, hvilken størrelse der skal vælges. Prøv begge størrelser, og vælg den, der er mest effektiv.

Nogle patienter, som anvender analproppen jævnligt, vil opleve, at proppen undertiden skubbes ud af endetarmen. Der er ingen åbenlys grund til denne reaktion, men erfaringen viser, at den samme bruger kan anvende proppen igen uden problemer efter en kort periode uden proppen.

Forsigtig

Dette produkt må ikke anvendes, uden at din læge eller sygeplejerske har foretaget en vurdering.

Kontakt din læge eller sygeplejerske, før du anvender Peristeen analprop for første gang; professionel vejledning i proppens anvendelse er absolut nødvendig.

Du må ikke bruge analproppen, hvis du har diarré.

Hvis Peristeen analprop anbringes i munden, udvider den sig, hvilket kan resultere i kvælning.

Fjern analproppen, når du mærker afføringstrang. Hvis du ingen følelse har i endetarmsområdet og ikke mærker afføringstrang, anbefales det at skifte proppen med regelmæssige mellemrum.

Peristeen analproppen skal fjernes senest 12 timer efter, at den er sat i. Hvis du oplever vanskeligheder med at fjerne Peristeen analproppen, skal du kontakte din læge eller sygeplejerske.

Hvis du gentagne gange oplever ubehag, når du bruger Peristeen analproppen, skal du holde op med at bruge den og kontakte din læge eller sygeplejerske.

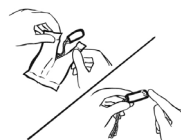
Opbevares utilgængeligt for børn.

Advarsel

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for at skade brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Sådan anvendes Peristeen analprop

Analproppen kan anvendes af patienter med afføringsinkontinens eller ufrivillig afgang af tarmluft (flatus). Den fungerer som en effektiv blokering for afføring i endetarmen.

**1. Forberedelse**

Smør en smule Peristeen Gel på spidsen af Peristeen analproppen. Andre smøremidler (f.eks. eksplorationscreme) kan anvendes i stedet.

**2. Indføring**

Sæt forsigtigt Peristeen analproppen op i endetarmsåbningen på samme måde som stikpille. Sørg for, at hele analproppen indføres i endetarmen, lige inden for endetarmsåbningens lukkemuskler. Lad gazen hænge udenfor.

**3. Anvendelse**

Peristeen analproppen er nu korrekt placeret i endetarmen og vil hurtigt udvide sig til fuld størrelse, efterhånden som filmen opløses af kroppens naturlige varme og fugt. Den kan blive siddende i endetarmen i op til 12 timer.

**4. Fjernelse**

Peristeen analproppen tages ud af endetarmen ved at trække forsigtigt i den gaze, der er indstøbt i proppen. Udtømningsrefleksen aktiveres ikke, når analproppen fjernes, så der er ingen grund til at skynde sig. Der kan indsættes en ny Peristeen analprop, straks efter at den gamle er fjernet. Efter brug skal Peristeen analproppen anbringes i en affaldsspand - IKKE i toilettet.

Bemærk: Peristeen analproppen skal fjernes senest 12 timer efter, at den er sat i. Hvis du oplever vanskeligheder med at fjerne Peristeen analproppen, skal du kontakte din læge.