

Danish/Dansk

## BARD® Urologisk Kateter

**Advarsel:** Brug ikke oliebaseerede salver eller smøremidler. De vil beskadige latexmaterialet.

Efterse nøje produktet for eventuelle mangler eller overfladeskader inden brug.

- Brug en injektionssprøjte med luer-spids til inflation med de angivne ml sterilt vand.  
ELLER
- For forfyldte produkter, aftag klipsen og tryk på beholderen for at inflatere med det anførte antal mL sterilt vand.

Kun til urologisk anvendelse.

Tømning af kateterballon: Sæt forsigtigt en sprøjte med luer-slip-spids ind i kateterventilen. Brug aldrig mere kraft end nødvendigt for at få sprøjten til at "sidde fast" i ventilen. Lad trykket inde i ballonen tvinge stemplet tilbage og fyld sprøjten med vand. Hvis der bemærkes langsom eller ingen tømning, skal sprøjten forsigtigt placeres rigtigt. Anvend kun let aspiration for at hjælpe tømningen om nødvendigt. Kraftig aspiration kan få inflationslumenen til at falde sammen og forhindre, at ballonen tømmes. Om fornødent, skal man kontakte relevant uddannet fagpersonale, som anført i hospitalsprotokollen.

Skulle ballonen bryde, skal der udvises forsigtighed med at sikre, at alle ballonstykker er blevet fjernet fra patienten.



Kun til brug på kvinder



Sprøjte med sterilt vand til  
ballonfyldning

Jf. produktets etiket mht. produktets indhold og om relevant kønsspecifik anvendelse.



Indeholder (spor af) naturgummilætex.

**Advarsel: Produktet indeholder naturgummi-lætex, som kan fremkalde allergiske reaktioner.**



Engangsbrug. Ikke til  
flergangsbrug.



Må ikke resteriliseres.

Denne anordning er beregnet til engangsbrug. Ingen del af denne anordning må resteriliseres. Genbrug og/eller omemballering kan udgøre en risiko for patient- eller brugerinfektion, kompromittere anordningens strukturelle integritet og/eller væsentlige materiale- og designegenskaber og medføre, at anordningen svigter, hvilket kan resultere i, at patienten kommer til skade, bliver syg eller dør.

**LOT**

Lotnummer

**REF**

Katalognummer



Anvendes før



Bemærk, se  
brugervejledning



Se brugsanvisningen.



**Opbevaring:** Opbevar katetre ved rumtemperatur borte fra direkte sollys, og helst i den oprindelige æske.



Beskyttes mod sollys.



Indhold



Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget

**STERILE**

R Steriliseret ved bestråling. ELLER **STERILE**

**EO**

Steriliseret med EO.

**Den benyttede steriliseringsmetode fremgår af mærkaten på anordningen.**



BARD, BARDEX, BARDIA, BIOCATH og LUBRICATH er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende C. R. Bard, Inc.



**Bemærk:** Efter brugen kan dette produkt udgøre en potentiel biologisk fare for miljøet. De skal håndtere og kassere det i overensstemmelse med accepteret lægelig praksis samt i henhold til gældende love og regulativer.