

SpeediCath Compact er ideelt til kateterisation på toilettet.

SpeediCath Compact er et unikt og diskret kateterkoncept, som er udviklet til kvindens anatomi. SpeediCath Compact overfladebehandlet kateter er 100 % Pvc-fri og leveres klar til brug i en steril saltvandsopløsning.

Begynd med at vaske hænderne og området omkring urinrørsåbningen. Det er vigtigt at undgå at overføre bakterier fra hænder eller kønsorganer til katetret SpeediCath Compact ligger i en steril saltvandsopløsning. Før du forsøger at åbne katetret, skal du sikre dig, at du er helt klar til at gå i gang med kateterisationen.

**Brugervejledning**

23322638 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder

forbeholdes.©

2019-11-20

Indikationer

Sterilt urinkateter til intermitterende brug.

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Katetret kan udsættes for ekstreme temperaturer (under 0 °C og op til 60 °C) i op til 24 timer, uden at det beskadiges.

Den saltvandsopløsning, som katetret opbevares i, er uskadelig. Opløsningen kan dog plette tøjet.

Kateterisationen skal udføres så hurtigt som muligt, efter pakken er blevet åbnet. Gennemfør kateterisationen uden afbrydelse og fjern katetret, når blæren er tømt.

Steriliseret med bestråling.

Forholdsregler

Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget.


Selvkateterisation med et kateter må kun foretages efter lægeordination og efter grundig oplæring. Følg altid vejledningen.

Kontakt din læge/sygeplejerske, hvis du:


- oplever, at katetret ikke tømmer blæren på samme måde som du er vant til.
- får en urinvejsinfektion med symptomer som feber, ubehag efter tømning af blære, hyppig vandladningstrang eller blod i urinen.

Advarsler


Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

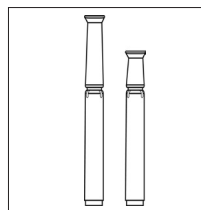


1. SpeediCath Compact

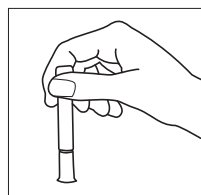


2. Hold produktet lodret med grebet nedad.

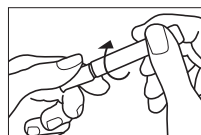


3. Bryd forseglingen ved forsigtigt at vride hylstrets to dele i hver sin retning.

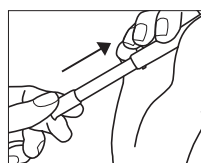

4. Træk langsomt det udvendige og det indvendige hylster fra hinanden, indtil katetret låses fast. Det udvendige hylster er katetrets greb. Katetret ligger i det inderste hylster.

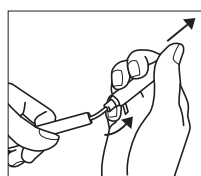

5. Katetret frigøres ved at holde godt fast i det udvendige hylster og fjerne det inderste hylster ved forsigtigt at vride dem fra hinanden. Det indvendige hylster skal kasseres eller tømmes og gemmes til diskret bortskaffelse senere. Katetret er nu klart til brug.

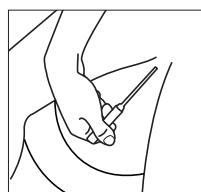

6. Skil skamlæberne med den ene hånd, så urinrørsåbningen blottes. Brug den anden hånd til forsigtigt at føre katetret ind i urinrøret, ca. 2 cm ad gangen. Lige før katetret når blæren, føler du måske en let modstand fra lukkemusklen.

Før langsomt katetret ind i urinrøret, indtil urinen begynder at flyde.

Når urinen holder op med at flyde, skal katetret trækkes ca. 1-2 cm ud. Hvis urinen begynder at flyde igen, skal du vente, til den stopper. Når blæren er helt tom fjernes katetret langsomt og kasseres.

Bortskaffelse

Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det må ikke skylles ud i toilettet.