

Klar-til-brug overfladebehandlet kateter.
Kvinde/ Mand


Sådan anvendes SpeediCath

Den nye generation af katetre - Klar-til-brug, overfladebehandlet, ligger i en saltvandsopløsning

Coloplasts nye kateterkoncept, SpeediCath, består af et overfladebehandlet, pvc-frit, klar-til-brug kateter, som ligger i en saltvandsopløsning.

Begynd med at vaske hænderne og området omkring urinrørsåbningen. Det er vigtigt at undgå at overføre bakterier fra hænderne til katetret.

Pakningen indeholder det overfladebehandlede kateter som ligger i en saltvandsopløsning. Før du forsøger at åbne kateteremballagen skal du sikre dig, at du er helt klar til at gå i gang med kateterisationen.

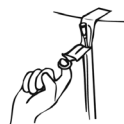

Hvis katetret har været opbevaret lodret, skal det vendes, så det er vandret, for at sikre, at saltvandsopløsningen fordeles jævnt, og dermed, at overfladen mættes helt. Fuldstændig mætning sikrer optimal overflade.

Brug klæbefeltet på bagsiden til at sætte pakningen fast på en glat, tør, vandret overflade. Åbn pakningen ved at trække ringen ind mod dig og derefter nedad. Tag SpeediCath katetret ud; det er nu klart til brug.

Mænd



Løft penis med den ene hånd for at rette urinrøret ud. Brug den anden hånd til at føre katetret ca. 2 cm ad gangen ind i urinrøret. Lige før katetret når blæren, føler du måske en let modstand fra lukkemusklen. Du må ikke klemme på penis; det kan gøre det vanskeligere at indføre katetret.

Tiemann kateter (buet spids):

Før du påbegynder indføringen, skal du sørge for, at katetrets buede spids vender opad. Tiemann-indikatoren (rille) på konnektoren skal hjælpe dig med at vende katetret rigtigt. Når katetret holdes vandret med indikatoren opad, vender kateterspidsen også opad.

Kvinder



Skil skamlæberne med den ene hånd, så urinrørsåbningen blottes. Brug den anden hånd til forsigtigt at føre katetret ind i urinrøret, ca. 2 cm ad gangen. Lige før katetret når blæren, føler du måske en let modstand fra lukkemusklen.

Fortsæt indføringen i urinrøret, indtil urinen begynder at løbe. Hvis der ikke er et toilet i nærheden, kan du tilslutte katetret til en urinpose eller en anden opsamlingsbeholder.

Når urinen holder op med at løbe, skal katetret trækkes ca. 2-3 cm ud. Hvis urinen begynder at løbe igen, skal du vente et par sekunder, før du trækker katetret yderligere 1-2 cm ud.

Når blæren er helt tom, fjernes katetret og kasseres hygiejnisk.



Brugervejledning

23313928 Version 2

Coloplasts logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © [2013-01]

Indikation

Katetret er kun til engangsbrug og skal kasseres efter brug.

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

Vi anbefaler at katetret opbevares ved stuetemperatur. Katetret kan godt tåle at blive udsat for ekstreme temperaturer (under 0° C og op til 60° C) i op til 24 timer, uden at det tager skade.

Katetret kan opbevares sammenrullet i op til 3 timer uden at miste faconen.

Den saltvandsopløsning, som katetret opbevares i, er uskadelig. Opløsningen kan dog plette tøjet.

Kateterisationen skal udføres så hurtigt som muligt, efter pakken er blevet åbnet. Gennemfør kateterisationen uden afbrydelse og fjern katetret, når blæren er tom.

Forsigtig

Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget.

Selvkateterisation med et kateter må kun foretages efter lægeordination og efter grundig oplæring. Følg altid vejledningen.

Kontakt din læge/sygeplejerske, hvis du:

- får en urinvejsinfektion med symptomer som feber, ubehag efter tømning af blære, hyppig vandladningstrang eller blod i urinen.

Advarsel

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for at skade brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.