

Set

Urinkateter med tilhørende pose til engangskateterisation.



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugervejledning

23314509 Version 1

Coloplasts logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © [2013-03]

Indikation

Sterilt urinkateter til engangsbrug.

Information

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger. Kateterisationen skal udføres så hurtigt som muligt, efter pakken er blevet åbnet. Gennemfør kateterisationen uden afbrydelse og fjern katetret, når blæren er tom.


Forsigtig

Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget. Selvkateterisation med et kateter må kun foretages efter lægeordination og efter grundig oplæring. Følg altid vejledningen. Kontakt din læge/sygeplejerske, hvis du:
- får en urinvejsinfektion med symptomer som feber, ubehag efter tømnings af blære, hyppig vandladningstrang eller blod i urinen.

Advarsel

Genbrug af dette engangsprodukt kan indebære en potentiel risiko for at skade brugeren. Genanvendelse, rensning, desinficering og sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at patienten lider fysisk skade eller får en infektion.

Dette produkt indeholder phthalater og må hverken anvendes af børn, gravide eller ammende kvinder, uden at en læge eller sygeplejerske spørges til råds.

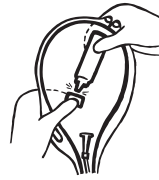Sådan anvendes et EasiCath Set – kateter med integreret urinpose

1. Åbn pakningen, og tag posen ud. Bryd ampullen, og klæm vandet ud i posen. Hold posen, så katetret vender nedad.



2. Vent mindst 30 sekunder.

MIN. 30 SEC.




3. Vend posen på hovedet, og åbn den ved at rive spidsen af.



4. Før katetret ind i urinrøret ved forsigtigt at skubbe det ud af posen. Når urinen holder op med at løbe, skal katetret trækkes ca. 2-3 cm ud. Hvis urinen begynder at løbe igen, skal du vente et par sekunder, før du trækker katetret yderligere 1-2 cm ud. Når blæren er tom, trækkes katetret langsomt ud af urinrøret og skubbes samtidig ind i posen.



5. Bind en kude for enden af posen.

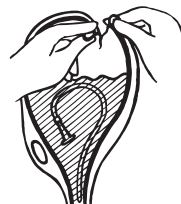

6. Læg posen i en affaldsspand, eller åbn den i den modsatte ende, og tom den.

Symboler

DEHP
DBP

Indhold eller tilstedeværelse af phthalat: En kombination af di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og dibutylphthalat (DBP)



Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget.