



Hydrofile engangskatetre RIK/SIK (intermitterende katerisation) med saltopløsning 0,9% og urinpose


- Kun til engangsbrug.
- Må ikke anvendes uden først at aktivere den sterile saltopløsning 0,9%*.
- Bør ikke anvendes såfremt kateter eller den sterile emballage er skadet.
- Katetret må ikke gen-steriliseres.
- Bør anvendes og opbevares ved stuetemperatur (15–25 °C).

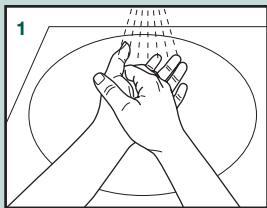


Vask og desinficér hænderne grundigt inden brug af kateteret.

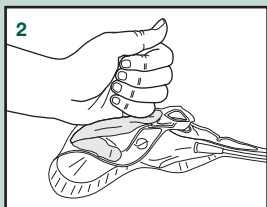


Tryk den sterile saltopløsning 0,9% ud af urinposen, ved at mase eller folde den sammen.

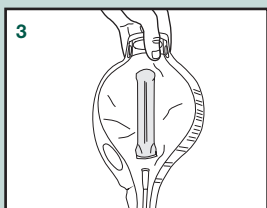


Sørg for at alt den sterile saltopløsning 0,9% kommer ud af urinposen, samt at den sterile saltopløsning fugtet hele kateteret, bortset fra konektor, i mindst 30 sek.

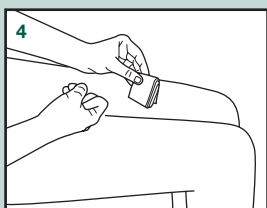


Desinficér området omkring urethraåbningen, med en desinfektion der er velegnet til brug på slimhinder. Følg herefter anvisning fra producenten.

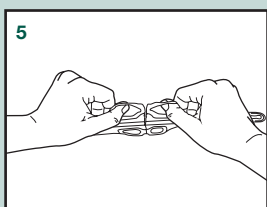


Åben urinposen så kateterspidsen kommer fri af emballagen. Undgå at berøre katetrets overflade, bortset fra konektoren.

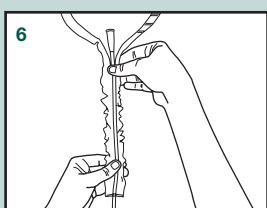

Indfør kateteret forsigtigt ind i urinrøret, indtil urinen begynder at strømme. Når urinen holder op med at flyde, træk kateteret langsomt ud.

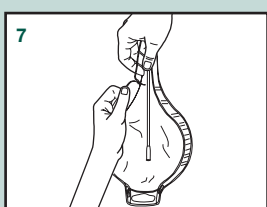

Skub kateteret tilbage i urinposen og slå en knude på emballagen. For at tømme urinposen rives i afmærkningen.

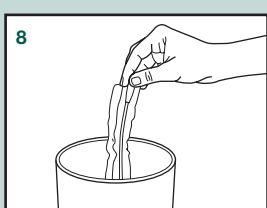

Følg evt. lokal vejledning fra institution mv. vedrørende bortanskaffelse.

Skulle du have spørgsmål eller problemer, kontakt venligst sygeplejerske/læge eller vores kundeservice.



Skal opbevares tørt



Må ikke udsættes for sollys



Læs brugsanvisningen



Må ikke genbruges



Må ikke gensteriliseres



Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.

CE 0123

I henhold til direktiv 93/42/EEC

STERILE EO

Sterilisering med ethylenoxid

LOT

Lot nr.



Anvendes inden (år-måned)



Styk

Brugergruppe: IQ26x4.xx – Mænd

Anvendelsesområde:

IQ-Cath er et kateter der er beregnet til inkontinenspleje og intermitterende katerisation i tilfælde af vandladningsforstyrrelser eller andre tømningforstyrrelser. Kateteret er beregnet til engangsbrug.

Indikation:

IQ katetret er beregnet til intermitterende blærekateterisation, på grund af neurogene vandladningsforstyrrelser, eller andre skader.

Yderligere indikationer er neuroblærer (pouch), hyperaktivitet i blæren i kombination med medicinsk behandling (botulinum toxin) og andre tømningssvækkigheder, som forstørret prostata, kronisk urinretention, kranie / hjerneskader og psykiske sygdom.

Kontraindikationer:

Skader på urinrøret, blødning i urinrøret, akut inflammation i urinrøret, obstruktioner i urinrøret, ved sphincteren eller ved prostata.

Bivirkninger:

Skader på urinrøret, blødning i urinrøret, irritation i urinrørets slimhinder.

Brugsvejledning:

Intermitterende katerisation bør kun foregå efter lægeordination, og bør kun udføres efter grundig oplæring af sygeplejerske/læge.

Sikkerhedsanvisninger:

Katetret er kun til engangsbrug. Genanvendelse, afvaskning og/eller resterilisering, kan påvirke katetrets egenskaber og dermed udgøre en risiko for brugeren.

Distributør:

ONEMED

OneMed A/S

P.O.Pedersens Vej 16 • 8200 Århus N

Tel. +45 86 109 109

info.dk@onemed.com • www.onemed.dk

CE 0123



2018-12.2 DK
S16825



MANFRED SAUER GMBH
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany